

ABX Pentra Ig G CP

■ Pentra C200

REF	A11A01924
REAGENT 1	40 mL
REAGENT 2	9 mL



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa *in vitro* de inmunoglobulina G (IgG) en suero o plasma mediante inmunoturbidimetría.

Versión de la aplicación ^a

Suero, plasma: (no para utilizar en los EE.UU.)

01.xx

Uso previsto (no para utilizar en los EE.UU.)^a

ABX Pentra Ig G CP es un reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa *in vitro* de inmunoglobulina G (IgG) en el suero o el plasma mediante turbidimetría.

La medición de esta inmunoglobulina facilita el diagnóstico del metabolismo anómalo de las proteínas y la incapacidad del organismo de resistir los agentes infecciosos.

Interés clínico (1, 2, 3)

Las clases de inmunoglobulina humana (IgG, IgA, IgM, IgE e IgD) son un grupo de glicoproteínas estrechamente emparentadas en cuanto a función y estructura. La IgG humana tiene una masa molecular de aproximadamente 150000 dalton y está compuesta por dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas que están unidas mediante enlaces disulfuro formando una Y característica. La IgG es producida por células plasmáticas (células B) y representa aproximadamente el 75% de todas las clases de inmunoglobulina soluble. La principal función de la IgG es unirse a los antígenos, iniciando la activación del complemento, y desencadenar el catabolismo del antígeno.

La concentración de IgG se reduce a causa de síndromes de inmunodeficiencia tanto primarios como secundarios.

Una mayor pérdida de proteínas por causa de un síndrome nefrótico puede dar lugar a una menor concentración de IgG. Un gran incremento de una clase de inmunoglobulina debido a un mieloma múltiple puede provocar una disminución en otras clases de inmunoglobulina como la IgG. El aumento en las concentraciones de IgG se puede observar en infecciones graves y enfermedades autoinmunes. Existen numerosas formas de mieloma que producen grandes cantidades de IgG monoclonal o policlonal. La determinación cuantitativa de IgG es importante para un diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Todos los métodos para la cuantificación de IgG se han calibrado para la IgG policlonal. La cuantificación de IgG monoclonal no está estandarizada y los valores pueden variar en los diferentes reactivos y métodos. Los valores deberían utilizarse únicamente para estudios de seguimiento. La inmunoglobulinemia monoclonal requiere la investigación detallada de un diagnóstico diferencial, además de la determinación cuantitativa.

Método

Ensayo inmunoturbidimétrico.

Determinación del punto final de la concentración de IgG realizada por medición fotométrica. Es una reacción antígeno-anticuerpo de los anticuerpos de IgG con la IgG que está presente en la muestra.

Reactivos ^b

ABX Pentra Ig G CP se presenta listo para su uso.

^aModificación: capítulo añadido.

^bModificación: § "Reactivos": modificación.

ABX Pentra Ig G CP

Reactivo 1 (R1):

TRIS pH 7,5	100 mmol/L
NaCl	150 mmol/L

Reactivo 2 (R2):

TRIS pH 8,0	100 mmol/L
NaCl	300 mmol/L

Anticuerpos (caprinos) contra la IgG humana < 1%

ABX Pentra Ig G CP debe utilizarse siguiendo este aviso. El fabricante no puede garantizar su funcionamiento si se utiliza de otro modo.

Manipulación

1. Retire los dos tapones del casete.
2. En caso de que haya espuma, retírela con una pipeta de plástico.
3. Coloque el casete en el compartimento de reactivos refrigerado.

Calibrador

Para la calibración utilice:

ABX Pentra SP Cal (A11A01927) (no incluido)

5 x 1 mL (5 niveles)

Este calibrador se puede trazar con CRM 470-CAP/IFCC.

La calibración se lleva a cabo haciendo uso de:

- Solución de NaCl 9 g/L para Cal 0 (concentración 0 mg/L).
- **ABX Pentra SP Cal**, que contiene cinco niveles de calibrador a diferentes concentraciones. Cada vial está etiquetado del 1 al 5. La relación nivel/concentración del calibrador se indica en el anexo.

Control ^c

Para el control de calidad interno utilice:

- **ABX Pentra SP Control Low / ABX Pentra N MultiControl** (A11A01928 / 1300054414) (no incluido)
3 x 1 mL / 10 x 5 mL (lío-filizado))
- **ABX Pentra SP Control High / ABX Pentra P MultiControl** (A11A01929 / 1300054415) (no incluido)
3 x 1 mL / 10 x 5 mL (lío-filizado))

^cModificación: nuevo control.

^dModificación: recomendación añadida.

Cada control debe realizarse diariamente y/o tras una calibración.

La frecuencia de los controles y los intervalos de confianza deben adaptarse a las exigencias del laboratorio y a las normativas específicas de cada país. Debería seguir las normativas federales, estatales y locales para someter a prueba materiales de control de calidad. Los resultados deberán encontrarse dentro de los límites de confianza definidos. Cada laboratorio establecerá el procedimiento que deberá seguirse cuando los resultados se encuentren fuera de dichos límites de confianza.

Materiales necesarios, pero no suministrados ^c

- Analizador automático de química clínica: Pentra C200
- Calibrador: **ABX Pentra SP Cal** (A11A01927)
- Controles:
 - ABX Pentra SP Control Low / ABX Pentra N MultiControl** (A11A01928 / 1300054414)
 - ABX Pentra SP Control High / ABX Pentra P MultiControl** (A11A01929 / 1300054415)
- Solución de NaCl: 9 g/L
- Equipamiento estándar de laboratorio.

Muestra ^d

- Suero.
- Plasma en heparina de litio o EDTA.

Los anticoagulantes que no estén incluidos en la lista no han sido probados por HORIBA Medical y por tanto no se recomienda su uso para este ensayo.

Estabilidad (4):

1 semana a 20 - 25°C

3 meses a 4 - 8°C

> 6 meses a -20°C

Congelar sólo una vez.

Valores de referencia

Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia. Los valores que aparecen en este documento deben tomarse sólo como pauta.

ABX Pentra Ig G CP

Adultos: (5) 7 - 16 g/L (700 - 1600 mg/dL)

Conservación y estabilidad

Estabilidad antes de abrir:

Permanece estable hasta su fecha de caducidad indicada en la etiqueta si se guarda entre 2-8°C.

Estabilidad después de la apertura:

Consulte el párrafo "Rendimiento en el Pentra C200".

No congelar.

Tratamiento de los residuos

- Consulte las normas legales locales.
- Este reactivo contiene menos de un 0,1% de azida sódica como conservante. La azida sódica puede reaccionar con el plomo y el cobre y formar azidas metálicas explosivas.

Precauciones generales ^e

- Este reactivo está indicado exclusivamente para el diagnóstico *in vitro* profesional.
- Venta exclusiva con receta médica.
- Este reactivo está clasificado como no peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) N°.1272/2008.
- **Reactivo 2 (R2):**
Advertencia: Este reactivo se obtiene de sustancias de origen animal. En consecuencia, se debe tratar como potencialmente infeccioso y manipular con la debida precaución de conformidad con las buenas prácticas de laboratorio (6).
 - No pipetear con la boca.
 - No reponga los reactivos.
 - No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas.
 - Siga las precauciones estándar de laboratorio para su uso.
 - Los casetes de reactivos son desechables y deben desecharse siguiendo las normas locales legales.
 - Consulte la ficha de seguridad (MSDS) del reactivo.
 - No utilice el producto si presenta pruebas visibles de deterioro biológico, químico o físico.
 - Es responsabilidad del usuario comprobar que este documento sea aplicable al reactivo utilizado.

Rendimiento en el Pentra C200

Suero, plasma

Los datos de rendimiento que se presentan a continuación han sido obtenidos en el analizador Pentra C200.

Número de tests: aproximadamente 89 tests

Estabilidad del reactivo en el equipo

Una vez abierto, el casete de reactivo colocado en el compartimento refrigerado del Pentra C200 permanece estable durante 28 días.

Volumen de muestra: 2 µL/test

Límite mínimo de interpretación

El límite mínimo de interpretación se ha evaluado utilizando la determinación múltiple de muestras de concentración baja y es de 0,17 g/L.

Exactitud y precisión

Repetibilidad (precisión intraensayo)

Repetibilidad según las recomendaciones que figuran en el protocolo Valtec (7) con muestras analizadas 20 veces:

- 2 controles
- 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

	Valor medio g/L	% CV
Muestra de control 1	6,11	1,25
Muestra de control 2	20,26	1,70
Muestra 1	4,93	2,12
Muestra 2	9,77	1,11
Muestra 3	17,89	1,28

Reproducibilidad (precisión total)

Reproducibilidad según las recomendaciones que figuran en el protocolo CLSI (NCCLS), EP5-A2(8) con muestras analizadas por duplicado durante 20 días (2 series por día):

- 2 controles
- 3 muestras (niveles bajo / medio / alto)

^eModificación: modificación de las precauciones generales.

ABX Pentra Ig G CP

	Valor medio g/L	% CV
Muestra de control 1	6,24	2,90
Muestra de control 2	20,57	2,45
Muestra 1	4,70	2,48
Muestra 2	9,62	2,28
Muestra 3	17,67	2,31

Intervalo de medida

El ensayo confirmó un intervalo de medida de 0,17 g/L a 30 g/L.

El intervalo de medida se amplía hasta 90 g/L con la posdilución automática.

Se ha evaluado la linealidad del reactivo hasta 30 g/L siguiendo las recomendaciones del protocolo CLSI (NCCLS), EP6-A (9).

Correlación

Muestras de paciente: Muestras de Suero

Número de muestras de paciente: 101

Las muestras se correlacionan con un reactivo comercial tomado como referencia siguiendo las recomendaciones - del protocolo CLSI (NCCLS), EP9-A2 (10).

Los valores oscilan desde 1,44 g/L hasta 26,42 g/L.

La ecuación de la recta alométrica obtenida con el procedimiento de regresión Passing-Bablok (11) es:

$$Y = 1,08 X + 0,28 \text{ (g/L)}$$

con un coeficiente de correlación $r^2 = 0,9912$.

Interferencias

Hemoglobina: Sin interferencias significativas hasta una concentración de 290 $\mu\text{mol/L}$ (500 mg/dL).

Triglicéridos: No se han observado interferencias significativas hasta una concentración de Intralipid® (representativa de la lipemia) de 7,0 mmol/L (612,5 mg/dL).

Bilirrubina total: Sin interferencias significativas hasta una concentración de 750 $\mu\text{mol/L}$ (43,9 mg/dL).

Bilirrubina directa: Sin interferencias significativas hasta una concentración de 750 $\mu\text{mol/L}$ (43,9 mg/dL).

Young ha indicado otras limitaciones recogidas en una lista de medicamentos y variables preanalíticas de los cuales se sabe que afectan a esta metodología (12, 13).

Efecto prozona

No se ha detectado exceso de antígenos hasta una concentración de 149 g/L.

Estabilidad de la calibración

El reactivo se calibra a Día 0. La estabilidad de la calibración se verifica sometiendo a prueba 2 controles.

La estabilidad de la calibración es de 14 días.

Nota: Se recomienda ejecutar una nueva calibración si se cambia de lote de reactivo o si los resultados del control de calidad exceden el intervalo establecido.

Referencia

1. Thomas L., editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft (1998): 667-78.
2. Johnson AM, Rohlf EM, Silverman LM. Proteins. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company (1999): 507-12.
3. Bartl R, Hoechtlen-Vollmar W, Thomas L. Monoclonal immunoglobulins. In: Thomas L., editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft (1998): 742-58.
4. Guder WG, Zawta B. The Quality of Diagnostics Samples. Samples: From the Patient to the Laboratory. 1st ed. Guder W.G., Narayanan S., Zawta B. (WILEY-VCH, Darmstadt, Germany) (2001): 24.
5. Dati F, Schumann G, Thomas L, Aguzzi F, Baudner S, Bienvenu J et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference ranges for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/BCR/CAP reference material (CRM 470). Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. (1996) **34**: 517-20.
6. Council Directive (2000/54/EC). Official Journal of the European Communities. No. L262 from October 17, 2000: 21-45.
7. Vassault A, Grafmeyer D, Naudin C et al. Protocole de validation de techniques (document B). Ann. Biol. Clin. (1986) **44**: 686-745.
8. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Method. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004) **24** (25).
9. Evaluation of the Linearity of Quantitative Analytical Methods. Approved Guideline, CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003) **23** (16).
10. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. Approved Guideline, 2nd ed., CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002) **22** (19).
11. Passing H, Bablok W. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. (1983) **21**: 709-20.
12. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 4th Edition, Washington, DC, AACC Press (1997) **3**: 143-163.
13. Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests. 2nd Edition, Washington, DC, AACC Press (1997) **3**: 120-132.