

Yumizen G CaCl₂ 4

**SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM 0,025 M POUR TESTS DE COAGULATION**

N. cat. : 1300036386 12 x 4 mL

NOM DU PRODUITYumizen G CaCl₂ 4**UTILISATION PREVUE****(Pour diagnostic in vitro uniquement)**

Yumizen G CaCl₂ 4 est destiné aux tests de l'hémostase comme le temps partiel de thromboplastine (APTT).

RESUME ET PRINCIPE

Le CaCl₂ est nécessaire pour le test APTT, qui est un test de dépistage général de la voie de coagulation intrinsèque (Facteurs : XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I).

PRINCIPES ACTIFS

Yumizen G CaCl₂ 4 est une solution de chlorure de calcium 0,025 M avec stabilisateur.

PRECAUTIONS

- La solution contient de l'azide de sodium. Elle peut former des azides métalliques, potentiellement explosifs dans les tuyauteries métalliques. Prendre les précautions appropriées.
- Les spécimens, échantillons et tous les matériaux entrant en contact avec eux doivent être manipulés comme s'ils étaient potentiellement infectieux et éliminés avec les précautions appropriées.
- Ne pas utiliser le réactif après la date de péremption imprimée sur l'étiquette !
- Éviter la contamination microbienne des réactifs, car elle pourrait conduire à des résultats erronés.
- Tous les réactifs, les déchets et les équipements de laboratoire jetables utilisés doivent être considérés comme des déchets dangereux. Il faut procéder à leur manipulation et élimination conformément aux réglementations relatives au traitement de matériaux dangereux en vigueur.

PREPARATION

La solution Yumizen G CaCl₂ 4 est fournie prête à l'emploi.

MODE D'EMPLOI

Respecter les instructions décrites dans la notice des réactifs pour l'APTT : Yumizen G PT 4 ; n. cat. : 1300036377, et Yumizen G APTT Liq 2 ; n. cat. : 1300036379.

CONSERVATION ET STABILITE

La solution Yumizen G CaCl₂ 4 en flacon intact est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon, lorsqu'il est conservé à 2-8°C. Après l'ouverture du flacon d'origine, la stabilité est celle qui indiquée dans le tableau ci-dessous :

T (°C)	37	15-19	2-8
Semaines	1 jour	8	8

LIMITES

L'utilisateur qui met en place le réactif doit être un professionnel de laboratoire qualifié.

MATERIEL NECESSAIRE MAIS NON FOURNI

Yumizen G CaCl₂ 4 est recommandé pour les tests de l'hémostase suivants :

- temps partiel de thromboplastine (Yumizen G APTT 4 ; n. cat. : 1300036377)
- temps partiel de thromboplastine (Yumizen G APTT 2 ; n. cat. : 1300036379)

FABRICANT

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE