

# Yumizen G SORB



## SOLUZIONE DI LAVAGGIO

N. cat.: 1300036418      12 x 15 mL

### DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

Yumizen G SORB

### USO PREVISTO

#### (Solo per uso diagnostico in vitro)

Yumizen G SORB serve per la manutenzione e la pulizia quotidiane degli analizzatori dell'emostasi Yumizen G800 / G1500 / G1550.

### RIEPILOGO E PRINCIPI

Yumizen G SORB è una soluzione di lavaggio di ipoclorito che pulisce efficacemente detriti cellulari, proteine e trigliceridi attraverso la digestione ossidativa e la solubilizzazione del detergente.

### INGREDIENTI ATTIVI

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ipoclorito di sodio   | < 5.0 % |
| idrossido di potassio | < 1.0 % |
| detergente            | < 1.0 % |

### PRECAUZIONI D'USO

- Non utilizzare il reagente dopo la data di scadenza stampata sull'etichetta.
- Tutti i reagenti, gli scarti e le attrezzature da laboratorio monouso utilizzate devono essere considerati rifiuti pericolosi. La manipolazione e lo smaltimento devono avvenire conformemente alla normativa vigente sul trattamento dei materiali pericolosi.
- Irritazione cutanea, categoria 2 
- Irritazione oculare, categoria 2
- Segnalazione: Avvertenza
- H315: Provoca irritazione cutanea.
- H319: Provoca grave irritazione oculare.
- H290: Può essere corrosivo per i metalli.
- P280: Usare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P390: Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P405: Conservare sotto chiave.
- P406: Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

- P501: Smaltire il prodotto e il contenitore conformemente a tutte le normative locali, regionali, nazionali e internazionali.
- P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con abbondante acqua e sapone.
- P332+P313: In caso di irritazione cutanea: consultare un medico.
- P337+P313: Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.
- La persona addetta all'installazione del reagente deve essere un professionista di laboratorio qualificato.

### PREPARAZIONE

**Yumizen G SORB** è una soluzione pronta all'uso. Attendere che la soluzione abbia raggiunto la temperatura di lavoro.

### CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Yumizen G SORB prima dell'apertura è stabile fino alla data di scadenza indicata sulla fiala, se conservata a 2–8°C. La stabilità dopo l'apertura nella fiala originale è indicata nella tabella seguente:

| T (°C) | 20-25 | 15-19 |
|--------|-------|-------|
| Giorno | 21    | 21    |

### RISULTATI PREVISTI

Yumizen G SORB utilizzata su base quotidiana pulirà efficacemente gli aghi dello strumento e manterrà i valori di carryover entro i limiti delle specifiche.

### MATERIALI NECESSARI NON IN DOTAZIONE

Per la disponibilità dei reagenti di cui sopra, contattare il proprio distributore di zona o direttamente il produttore.

- Yumizen G800 / G1500 / G1550.



**HORIBA ABX SAS**  
Parc Euromédecine - Rue du Caducée  
B.P. 7290  
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE