

Yumizen G SORB



ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ

Αριθ. κατ.: 1300036418 12 x 15 ml

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Yumizen G SORB

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

(Αποκλειστικά για In Vitro διαγνωστική χρήση)

Το Yumizen G SORB προορίζεται για καθημερινή συντήρηση και καθαρισμό αναλυτών αιμόστασης Yumizen G800 / G1500 / G1550.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το Yumizen G SORB είναι ένα διάλυμα πλύσης υποχλωριώδους το οποίο καθαρίζει αποτελεσματικά υπολείμματα κυττάρων, πρωτεΐνες και τριγλυκερίδια μέσω οξειδωτικής αποδόμησης και διαλυτοποίησης απορρυπαντικού.

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

sodium hypochlorite	< 5.0 %
υδροξείδιο του καλίου	< 1.0 %
απορρυπαντικό	< 1.0 %

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το αντιδραστήριο πέραν της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
- Όλα τα αντιδραστήρια, τα απόβλητα και ο χρησιμοποιημένος αναλυσίμος εργαστηριακός εξοπλισμός θα πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Ο χειρισμός και η απόρριψή τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό για τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών.

- Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
- Ερεθισμός των ματιών, κατηγορία 2
- Προειδοποιητική λέξη: Προειδοποίηση
- H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P390: Σκουπίστε το υλικό που τυχόν χυθεί για να αποφευχθούν υλικές ζημιές.
- P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P406: Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.



- P501: Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Το άτομο που εγκαθιστά το αντιδραστήριο πρέπει να είναι εκπαιδευμένος επαγγελματίας εργαστηρίου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Yumizen G SORB Το διάλυμα Yumizen G SORB είναι έτοιμο για χρήση. Περιμένετε μέχρι το διάλυμα να φτάσει στη θερμοκρασία εργασίας!

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Το διάλυμα Yumizen G SORB σε άθικτο φιαλίδιο παραμένει σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο, εφόσον φυλάσσεται στους 2-8°C. Η σταθερότητα εντός του αρχικού φιαλιδίου μετά το άνοιγμα, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

T (°C)	20-25	15-19
Ημέρα	21	21

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η χρήση του διαλύματος Yumizen G SORB σε καθημερινή βάση θα εξασφαλίσει τον αποτελεσματικό καθαρισμό των βελονών του αναλυτή, διατηρώντας τις τιμές υποβάθρου και επιμόλυνσης μεταξύ δειγμάτων εντός των προδιαγραφών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Για τη διαθεσιμότητα των παραπάνω αντιδραστηρίων, απευθυνθείτε στον τοπικό σας διανομέα ή απευθείας στον κατασκευαστή.

- Yumizen G800/ G1500 / G1550.



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE