

**ACTICLOT® C – REF ACC-45**
**Εφαρμογή Οργάνου Για Τους Αναλυτές HORIBA ABX SAS  
 Yumizen G800/G1500/G1550**

Η ακόλουθη εφαρμογή οργάνου έχει επικυρωθεί στον αναλυτή πήξης HORIBA Yumizen G800. Οι προτεινόμενες οδηγίες προγραμματισμού βασίζονται στις γνώσεις μας για τον αναλυτή και τα αντιδραστήριά μας. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές σε συνδυασμό με το δικό σας πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας για επικύρωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών, κρατικών ή/και ομοσπονδιακών κανονισμών ή πιστοποιήσεων. Αν χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της HORIBA Medical.

**Απαιτούμενα Υλικά**

Είδος	Αρ. Καταλόγου BioMedica Diagnostics	Αρ. Καταλόγου Horiba Medical	Συσκευασία
ACTICLOT® C	ACC-45	1300081527	3 x 1,5 ml
			3 x 1,5 ml
			3 x 0,5 ml
			3 x 5 ml
Ειδικός βαθμονομητής Πήξης	C.BMD.SCC030-01ML-A	1300081561	6 x 1 ml
Ειδικό πλάσμα ελέγχου Πήξης Κανονικός	C.BMD.SCCN180-01ML-A	1300081529	10 x 1 ml
Ειδικό πλάσμα ελέγχου Πήξης Ασυνήθιστος	C.BMD.SCCA180-01ML-A	1300081560	10 x 1 ml
CaCl <sub>2</sub>		1300036386	12 x 4 ml
Καθαρίστε Το Μεγάλο Ποτήρι Του Φιαλιδίου			
Κύπελλα Eppendorf			

## Οδηγίες προγραμματισμού του yumizen G800/G1500/G1550

Για να ξεκινήσετε, συνδεθείτε ως Admin (Διαχειριστής)

1. Επιλέξτε Test Setup (Ρύθμιση εξέτασης) και πατήστε το εικονίδιο +Add (+Προσθήκη) στο υποσέλιδο της οθόνης του G800/G1500/G1550, για να προσθέσετε ένα νέο πρόγραμμα. Εισαγάγετε την τιμή PC ac ως Short Name (Σύντομο όνομα), εισαγάγετε την τιμή PC activity (PC δραστηριότητα) ως Name (Όνομα).
2. Υπάρχουν επτά (7) οθόνες για την εφαρμογή: Analysis (Ανάλυση), Reaction (Αντίδραση), Calibration (Βαθμονόμηση), Control (Έλεγχος), Output (Έξοδος), Repeat (Επανάληψη) και Postcheck (Ταχυδρομικός έλεγχος).
3. .
4. Όταν ολοκληρώσετε την ενέργεια, πατήστε το εικονίδιο Save (Αποθήκευση) στο υποσέλιδο της οθόνης, για να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στο μενού εξέτασης.

### Οθόνη 1 [Analysis (Ανάλυση)]

1. Ορίστε για το στοιχείο Test Method (Μέθοδος εξέτασης) την επιλογή Clotting (Πήξη).
2. Ορίστε για το στοιχείο Wavelength (Μήκος κύματος) την επιλογή 640.
3. Ορίστε για το στοιχείο Algorithm (Αλγόριθμος) την επιλογή APTT.
4. Ορίστε για το στοιχείο Warm reagent (Θέρμανση αντιδραστήριου) την επιλογή Start (Έναρξη).
5. Εισαγάγετε για το στοιχείο Min time (Ελάχ. χρόνος) την τιμή 15, για το στοιχείο Max time (Μέγ. χρόνος) την τιμή 180 και για το στοιχείο Lag time (Χρόνος καθυστέρησης) την τιμή 10.

### Οθόνη 2 [Reaction (Αντίδραση)]

1. Εισαγάγετε στην ενότητα Sample (Δείγμα): για το στοιχείο Volume (Όγκος) την τιμή 50, για το στοιχείο Incubation (Επώαση) την τιμή 0 και για το στοιχείο Rate (Ρυθμός) την τιμή 1/8.
2. Εισαγάγετε στο στοιχείο Diluent Name (Όνομα αραιωτικού): PC Diluent (Αραιωτικό PC).
3. Εισαγάγετε στο στοιχείο Reag nr (Αρ. αντιδραστήριου): 3.
4. Στη γραμμή 1 εισαγάγετε την τιμή PCDP ως Name (Όνομα) και ρυθμίστε τις ακόλουθες τιμές:

Vol (Όγκος)	50
Incubation (Επώαση):	0
Mixing (Ανάμιξη):	Cuv (Κυβέτα): 3, Pip (Πιπέτα): 0
Before Wash (Πριν την πλύση):	Intensive (Εντατικός)
After Wash (Μετά την πλύση):	Intensive (Εντατικός)
Spec cleaner (Ειδικό καθαριστικό):	leave blank (Αφήστε κενό)
Wash after spec (Πλύση μετά από ειδικό):	leave blank (Αφήστε κενό)
Calib (Βαθμονόμηση):	√

5. Στη γραμμή 2 εισαγάγετε την τιμή PC ACT ως Name (Όνομα) και ρυθμίστε τις ακόλουθες τιμές:

Vol (Όγκος)	50
Incubation (Επώαση):	240
Mixing (Ανάμιξη):	Cuv (Κυβέτα): 3, Pip (Πιπέτα): 0
Before Wash (Πριν την πλύση):	No (Όχι)
After Wash (Μετά την πλύση):	Intensive (Εντατικός)
Spec cleaner (Ειδικό καθαριστικό):	leave blank (Αφήστε κενό)
Wash after spec (Πλύση μετά από ειδικό):	leave blank (Αφήστε κενό)
Calib (Βαθμονόμηση):	√

6. Στη γραμμή 3 εισαγάγετε την τιμή 25 mM CaCl<sub>2</sub> ως Name (Όνομα) και ρυθμίστε τις ακόλουθες τιμές:

Vol (Όγκος)	50
Incubation (Επώαση):	
Mixing (Ανάμιξη):	Cuv (Κυβέτα): 3, Pip (Πιπέτα): 0
Before Wash (Πριν την πλύση):	No (Όχι)
After Wash (Μετά την πλύση):	Intensive (Εντατικός)
Spec cleaner (Ειδικό καθαριστικό):	leave blank (Αφήστε κενό)
Wash after spec (Πλύση μετά από ειδικό):	leave blank (Αφήστε κενό)
Calib (Βαθμονόμηση):	√
Wait Time (Χρόνος αναμονής):	180
Nr of meas (Αρ. μετρήσεων):	1
Max diff (Μέγ. διαφορά):	10

### Θόνη 3 [Calibration (Βαθμονόμηση)]

Στη γραμμή 1 ρυθμίστε τις ακόλουθες τιμές:

Unit (Μονάδα):	%
Calibrator (Μετρητής):	PC CAL
Diluent Name (Όνομα Αραιωτικού):	PC Diluent
Mode (Τρόπος λειτουργίας):	Linear regression (Γραμμική παλινδρόμηση)
Fit (Προσαρμογή):	Lin-Lin (Γραμμική-Γραμμική)
Level nr. (Αρ. επιπέδου):	6
Rates (Ρυθμοί):	1/8, 1/12, 1/20, 1/32, 1/64, 0
Extrapolation (Προεκβολή):	√
Extrapolation Range (Περιοχή προεκβολής):	0, 130
Conversion (Μετατροπή):	A = 1, B = 0

#### Οθόνη 4 [Control (Έλεγχος)]

1. Select Level nr. as 2
2. Στη γραμμή "1" εισαγάγετε "SCCN" ως Όνομα
3. Στη γραμμή "2" εισαγάγετε "SCCA" ως Όνομα
4. Στο Χρονικό Διάστημα (h) εισάγετε "24"

#### Οθόνη 5 [Output (Έξοδος)]

1. Εισαγάγετε στο στοιχείο Unit nr. (Αρ. μονάδας): 2.
2. Στη γραμμή 1 ρυθμίστε τις ακόλουθες τιμές:

Name (Όνομα):	%
Screen (Οθόνη):	√
Print (Εκτύπωση):	√
Online (Σε σύνδεση):	√
QC (Έλεγχος ποιότητας):	√

3. Στη γραμμή 2 ρυθμίστε τις ακόλουθες τιμές:

Name (Όνομα):	s
Print (Εκτύπωση):	√
Online (Σε σύνδεση):	√
QC (Έλεγχος ποιότητας):	√

#### Οθόνη 6 [Repeat (Επανάληψη)]

Δεν έγιναν επιλογές/καταχωρήσεις.

#### Οθόνη 7 [Postcheck (Εκ των υστέρων έλεγχος)]

Εισαγάγετε τις ακόλουθες τιμές:

DMin (Ελάχ. απόσταση):	100
MinStep (Ελάχ. βήμα):	50
WeakCoag (Αδύναμη πήξη):	50
SlopeDX (DX κλίσης):	0
SlopeDY (DY κλίσης):	0
MinRecTime (Ελάχ. χρόνος εγγ.):	50
MaxValue (Μέγ. τιμή):	3500
Discontinue (Διακοπή):	60
HistWidth (Ιστ. πλάτος):	15
HistLimit (Ιστ. όριο):	150

## Διαμόρφωση καταλόγου:

### 1.1. Ενεργοποιητής Πρωτεΐνης C

Πατήστε το εικονίδιο +Add (+Προσθήκη) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου του G800/G1500/G1550 για να προσθέσετε ένα νέο αντιδραστήριο.

Ορίστε για το στοιχείο Type (Τύπος) την επιλογή Reagent (Αντιδραστήριο).

Εισαγάγετε την τιμή PC ACT ως Name (Όνομα).

Εισαγάγετε τον αριθμό παρτίδας αντιδραστηρίου που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως Lot (Παρτίδα).

Εισαγάγετε την τιμή ACC-45A ως Ref Number (Αριθμός αναφοράς).

Εισαγάγετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως ExpDate (Ημερομηνία λήξης).

Εισαγάγετε την τιμή 8 ως Onboard Time (Χρόνος επί του οργάνου).

Εισαγάγετε την τιμή 1,5 ως Nominal Volume (Ονομαστικός όγκος).

Ορίστε για το στοιχείο Vial Type (Τύπος φιαλιδίου) την επιλογή Eppendorf Cup (Κύπελλα Eppendorf).

Πατήστε το εικονίδιο OK, για να επιβεβαιώσετε τη διαμόρφωση ενεργοποιητή πρωτεΐνης C.

Πατήστε το εικονίδιο Save (Αποθήκευση) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου, για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση αντιδραστηρίου.

### 1.2. Ανεπάρκεια Πλάσματος Πρωτεΐνης C

Πατήστε το εικονίδιο +Add (+Προσθήκη) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου του G800/G1500/G1550 για να προσθέσετε ένα νέο αντιδραστήριο.

Ορίστε για το στοιχείο Type (Τύπος) την επιλογή Reagent (Αντιδραστήριο).

Εισαγάγετε την τιμή PCDP ως Name (Όνομα).

Εισαγάγετε τον αριθμό παρτίδας αντιδραστηρίου που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως Lot (Παρτίδα).

Εισαγάγετε την τιμή ACC-45P ως Ref Number (Αριθμός αναφοράς).

Εισαγάγετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως ExpDate (Ημερομηνία λήξης).

Εισαγάγετε την τιμή 8 ως Onboard Time (Χρόνος επί του οργάνου).

Εισαγάγετε την τιμή 1,5 ως Nominal Volume (Ονομαστικός όγκος).

Ορίστε στο στοιχείο Vial Type (Τύπος φιαλιδίου) την επιλογή Eppendorf Cup (Κύπελλα Eppendorf).

Πατήστε το εικονίδιο OK, για να επιβεβαιώσετε τη διαμόρφωση ανεπάρκειας πλάσματος πρωτεΐνης C.

Πατήστε το εικονίδιο Save (Αποθήκευση) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου, για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση αντιδραστηρίου.

### 1.3. Ρυθμιστικό Διάλυμα ραίωσης

*Σημείωση: Το ρυθμιστικό διάλυμα αραιώσης παρέχεται ως συμπύκνωμα. Προετοιμάστε το ρυθμιστικό διάλυμα αραιώσης ισχύος αραιώσης αραιώνοντας το συμπύκνωμα 1:10 με διηθημένο απιονισμένο νερό.*

Πατήστε το εικονίδιο +Add (+Προσθήκη) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου του G800/G1500/G1550 για να προσθέσετε ένα νέο αντιδραστήριο.

Ορίστε για το στοιχείο Type (Τύπος) την επιλογή Other (Άλλα).  
Εισαγάγετε την τιμή PC Diluent (Αραιωτικό) ως Name (Όνομα).  
Εισαγάγετε τον αριθμό παρτίδας αντιδραστηρίου που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως Lot (Παρτίδα).  
Εισαγάγετε την τιμή ACC-45D ως Ref Number (Αριθμός αναφοράς).  
Εισαγάγετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως ExpDate (Ημερομηνία λήξης).  
Εισαγάγετε την τιμή 8 ως Onboard Time (Χρόνος επί του οργάνου).  
Εισαγάγετε την τιμή 15 ως Nominal Volume (Ονομαστικός όγκος).  
Ορίστε στο στοιχείο Vial Type (Τύπος φιαλιδίου) την επιλογή Vial big glass (Φιαλίδιο μεγάλο ποτήρι).

Πατήστε το εικονίδιο "OK" για να επιβεβαιώσετε τη διαμόρφωση του διαλύματος αραιώσης.  
Πατήστε το εικονίδιο Save (Αποθήκευση) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου, για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση αντιδραστηρίου.

#### 1.4. Βαθμονομητής

Πατήστε το εικονίδιο +Add (+Προσθήκη) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου του G800/G1500/G1550 για να προσθέσετε έναν νέο βαθμονομητή.

Ορίστε για το στοιχείο Type (Τύπος) την επιλογή Calibrator (Βαθμονομητής).  
Εισαγάγετε την τιμή SCC (Βαθμον. PC) ως Name (Όνομα).  
Εισαγάγετε τον αριθμό παρτίδας βαθμονομητή που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως Lot (Παρτίδα).  
Εισαγάγετε την τιμή SCC030 ως Ref Number (Αριθμός αναφοράς).  
Εισαγάγετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως ExpDate (Ημερομηνία λήξης).

Εισαγάγετε την τιμή 8 ως Onboard Time (Χρόνος επί του οργάνου).  
Εισαγάγετε την τιμή 1 ως Nominal Volume (Ονομαστικός όγκος).  
Ορίστε για το στοιχείο Vial Type (Τύπος φιαλιδίου) την επιλογή Eppendorf Cup (Κύπελλα Eppendorf).

Στον πίνακα βαθμονομητή, επιλέξτε τις τιμές:

Γραμμή 1: PC ac ως Test (Εξέταση), % ως Unit (Μονάδα)

Πατήστε το εικονίδιο OK, για να επιβεβαιώσετε τη διαμόρφωση βαθμονομητή.  
Πατήστε το εικονίδιο Save (Αποθήκευση) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου, για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση του Βαθμονομητή.

#### 1.5. Έλεγχος Φυσιολογικού

Πατήστε το εικονίδιο +Add (+Προσθήκη) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου του G800/G1500/G1550 για να προσθέσετε έναν νέο έλεγχο.

Σελίδα 6 από 9

Ορίστε για το στοιχείο Type (Τύπος) την επιλογή Control (Έλεγχος).  
Εισαγάγετε την τιμή SCCN ως Name (Όνομα).  
Εισαγάγετε τον αριθμό παρτίδας ελέγχου που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως Lot (Παρτίδα).  
Εισαγάγετε την τιμή SCCN180 ως Ref Number (Αριθμός αναφοράς).  
Εισαγάγετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως ExpDate (Ημερομηνία λήξης).  
Εισαγάγετε την τιμή 8 ως Onboard Time (Χρόνος επί του οργάνου).  
Εισαγάγετε την τιμή 1 ως Nominal Volume (Ονομαστικός όγκος).  
Ορίστε για το στοιχείο Vial Type (Τύπος φιαλιδίου) την επιλογή Eppendorf Cup (Κύπελλα Eppendorf).

Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τις τιμές:

Γραμμή 1: PC ac ως Test (Εξέταση), % ως Unit (Μονάδα), XX ως Min (Ελάχ.), XXX ως Max (Μέγ.)

Πατήστε το εικονίδιο OK, για να επιβεβαιώσετε τη διαμόρφωση ελέγχου φυσιολογικού.  
Πατήστε το εικονίδιο Save (Αποθήκευση) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου, για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση ελέγχου.

## 1.6. Έλεγχος Μη Φυσιολογικού

Πατήστε το εικονίδιο +Add (+Προσθήκη) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου του G800/G1500/G1550 για να προσθέσετε έναν νέο έλεγχο.

Ορίστε για το στοιχείο Type (Τύπος) την επιλογή Control (Έλεγχος).  
Εισαγάγετε την τιμή SCCA ως Name (Όνομα).  
Εισαγάγετε τον αριθμό παρτίδας ελέγχου που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως Lot (Παρτίδα).  
Εισαγάγετε την τιμή SCCA180 ως Ref Number (Αριθμός αναφοράς).  
Εισαγάγετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο φιαλίδιο ως ExpDate (Ημερομηνία λήξης).  
Εισαγάγετε την τιμή 8 ως Onboard Time (Χρόνος επί του οργάνου).  
Εισαγάγετε την τιμή 1 ως Nominal Volume (Ονομαστικός όγκος).  
Ορίστε για το στοιχείο Vial Type (Τύπος φιαλιδίου) την επιλογή Eppendorf Cup (Κύπελλα Eppendorf).

Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τις τιμές:

Γραμμή 1: PC ac ως Test (Εξέταση), % ως Unit (Μονάδα), XX ως Min (Ελάχ.), XX ως Max (Μέγ.)

Πατήστε το εικονίδιο OK, για να επιβεβαιώσετε τη διαμόρφωση ελέγχου μη φυσιολογικού.  
Πατήστε το εικονίδιο Save (Αποθήκευση) στο υποσέλιδο της οθόνης αντιδραστηρίου, για να αποθηκεύσετε τη διαμόρφωση ελέγχου.

## Σύνοψη δεδομένων

### Γραμμικότητα

Η γραμμικότητα του ACTICLOT C προσδιορίστηκε με δοκιμασία δειγμάτων πλάσματος σε έντεκα (11) διαφορετικά επίπεδα, παρασκευασμένα ως έντεκα (11) αραιώσεις φυσιολογικού πλάσματος, εντός του δηλωμένου εύρους εργασίας της δοκιμασίας. Κάθε δείγμα παρασκευάστηκε με άμεση αραιώση του αρχικού υψηλού δείγματος και όχι με σειριακές αραιώσεις. Πραγματοποιήθηκαν τριπλές μετρήσεις σε κάθε δείγμα και υπολογίστηκε ο μέσος όρος των τριπλών επαναλήψεων.

Το ACTICLOT C είναι γραμμικό από 2.5% – 130% του φυσιολογικού.

### Όριο ανίχνευσης

Το όριο ανίχνευσης, LoD, του ACTICLOT C σε διάστημα εμπιστοσύνης 95% διαπιστώθηκε ότι είναι 2,5%. Αυτό το επίπεδο καθορίστηκε με δοκιμή ενός τυφλού δείγματος πλάσματος (με ανεπάρκεια πρωτεΐνης C) και χαμηλού (5%) δείγματος πλάσματος πρωτεΐνης C σε 20 επαναλήψεις κάθε ημέρα για 3 ημέρες. Το LoD υπολογίστηκε σύμφωνα με το CLSI EP17-A: Πρωτόκολλα για τον προσδιορισμό των ορίων ανίχνευσης και των ορίων ποσοτικού προσδιορισμού. Εγκεκριμένη οδηγία.

### Ακρίβεια

Η επαναληψιμότητα, η ακρίβεια (εντός του οργάνου) και η αναπαραγωγιμότητα για το ACTICLOT C σε ΔΕ 95% προσδιορίστηκαν με εξέταση ενός φυσιολογικού συγκεντρωμένου πλάσματος και ενός παθολογικού πλάσματος πρωτεΐνης C επί 5 ημέρες με 5 επαναλήψεις ανά ημέρα για κάθε δείγμα. Ο συντελεστής διακύμανσης ΣΔ υπολογίστηκε βάσει του εγγράφου του CLSI EP05-A3: Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline – Third Edition, Section 4.6 (Αξιολόγηση ακρίβειας διαδικασιών ποσοτικής μέτρησης, Εγκεκριμένο έγγραφο καθοδήγησης – Τρίτη έκδοση, Ενότητα 4.6), για μια μορφή μελέτης 3x5x5.

Προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι συντελεστές διακύμανσης.

ACTICLOT C	Δείγμα Εξέτασης	Επαναληψιμότητα ΣΔ σε ΔΕ 95%	Ακρίβεια εντός του οργάνου ΣΔ σε ΔΕ 95%	Αναπαραγωγιμότητα ΣΔ σε ΔΕ 95%
	Ειδικό Πλάσμα Ελέγχου Πήξης Κανονικός	8,7%	9,3%	9,3%
	Ειδικό Πλάσμα Ελέγχου Πήξης Ασυνήθιστος	9,4%	12,5%	13,1%

## Σταθερότητα ανασυσταθέντος αντιδραστηρίου επί του οργάνου

Η σταθερότητα των ανασυσταθέντων αντιδραστηρίων που φυλάσσονται επί του αναλυτή Yumizen G800/G1500/G1550 επιβεβαιώθηκε ως εξής:

Αντιδραστήριο	Θερμοκρασία φύλαξης	Σταθερότητα
ACTICLOT Ενεργοποιητής	17°C, ανοικτό φιαλίδιο επί του οργάνου	8 ώρες
Ανεπάρκεια Πλάσματος Πρωτεΐνης C	17°C, ανοικτό φιαλίδιο επί του οργάνου	8 ώρες
Ρυθμιστικό Διάλυμα Αραιώσης	17°C, ανοικτό φιαλίδιο επί του οργάνου	8 ώρες
Ειδικός βαθμονομητής Πήξης	17°C, ανοικτό φιαλίδιο επί του οργάνου	8 ώρες
Ειδικό Πλάσμα Ελέγχου Πήξης Κανονικός	17°C, ανοικτό φιαλίδιο επί του οργάνου	8 ώρες
Ειδικό Πλάσμα Ελέγχου Πήξης Ασυνήθιστος	17°C, ανοικτό φιαλίδιο επί του οργάνου	8 ώρες

Τα δεδομένα σταθερότητας που παρουσιάζονται παραπάνω έχουν καθιερωθεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες εργαστηρίου. Λόγω των πιθανών διαφορών στις «συνθήκες περιβάλλοντος» μεταξύ κάθε εργαστηρίου και αντιδραστηρίου, η σταθερότητα επί του οργάνου ενδέχεται να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω.

## Μελέτες Παρεμβολών

Τα αποτελέσματα δεν καταδεικνύουν σημαντικές παρεμβολές στην απόδοση του ACTICLOT C από την παρουσία των ακόλουθων ουσιών έως τις συγκεντρώσεις που σημειώνονται.

Ουσία	Συγκέντρωση
Αιμοσφαιρίνη	500 mg/dl
Χολερυθρίνη, Συζευγμένη	20 mg/dl
Χολερυθρίνη, Μη Συζευγμένη	20 mg/dl
Τριγλυκερίδια	750 mg/dl

**Σημείωση** – Για μια επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ή αλλαγής ενός πρωτοκόλλου εξέτασης στο G800/G1500/G1550, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ρύθμιση στο εγχειρίδιο χειριστή συστήματος HORIBA ABX SAS.

## Παραπομπή

1. Το ACTICLOT® είναι σήμα κατατεθέν της BioMedica Diagnostics Inc., Windsor, NS, Canada
2. Οι ονομασίες Yumizen G800, Yumizen G1550, Yumizen G1550 είναι σήματα της HORIBA ABX SAS, Montpellier, France