
Ενημέρωση Εγχειριδίου Χρήσης Οργάνου RAM190A

ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80,
Pentra 400, ABC Vet
Αντικατάσταση τόνερ OKI B4200 και κιτ τυμπάνου του εκτυπωτή



Λάβετε υπόψη σας τις τροποποιήσεις στις επόμενες σελίδες. Διαγράψτε τις σχετικές ενότητες από το εγχειρίδιο χρήσης πριν συμπεριλάβετε την παρούσα προσθήκη στην αρχή του εγχειριδίου χρήσης.

Ημερομηνία: 23/3/05

Αντικατάσταση τόνερ OKI B4200 και κιτ τυμπάνου του εκτυπωτή

Πίνακας 1-1: Σχετικές ενότητες του εγχειριδίου

Ενότητα	Σελίδα	Παράγραφος	Αλλαγή στοιχείου
Παράρτημα		Νέες διαδικασίες εκτυπωτή	Αντικατάσταση τόνερ και κιτ τυμπάνου

1. Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ


1.1. Πληροφορίες σχετικά με την κασέτα τόνερ

- ◆ Η διάρκεια της κασέτας τόνερ εξαρτάται από την πυκνότητα εκτύπωσης, το ποσοστό εκτύπωσης με μαύρο χρώμα σε κάθε σελίδα. Η πυκνότητα εκτύπωσης ενός τυπικού γράμματος κυμαίνεται μεταξύ 3% και 5%, ενώ η πυκνότητα των γραφικών είναι συνήθως μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη πυκνότητα εκτύπωσης συνεπάγεται την ανάληψη του τόνερ με ταχύτερους ρυθμούς. Με πυκνότητα εκτύπωσης 5%, μια τυπική κασέτα τόνερ επαρκεί για την εκτύπωση περίπου 2500 σελίδων. Έχετε υπόψη σας ότι ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα μέσο όρο σελίδων: τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.
- ◆ Η πρώτη κασέτα τόνερ που τοποθετείται σε έναν καινούριο εκτυπωτή πρέπει να γεμίσει το δοχείο του τυμπάνου απεικόνισης και να διαποτίσει τον περιστρεφόμενο κύλινδρο με τόνερ. Η πρώτη τυπική κασέτα τόνερ επαρκεί συνήθως για την εκτύπωση περίπου 1.000 σελίδων μετά από την εγκατάσταση.

1.2. Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ


Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ όταν η ενδεικτική λυχνία LED σφάλματος (4) αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει περίπου 100 σελίδες μετά την εμφάνιση της ένδειξης Toner Low και στη συνέχεια θα διακοπεί η εκτύπωση. Η εκτύπωση συνεχίζεται μετά από την εγκατάσταση νέας κασέτας τόνερ. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε τη στάθμη του τόνερ:

1. Πατήστε το κουμπί (5) για να απενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία LED (2).
2. Πατήστε το κουμπί (5) για 2 έως 5 δευτερόλεπτα.
3. Η λυχνία LED (2) θα αναβοσβήσει και θα εκτυπωθούν 3 σελίδες κατάστασης.

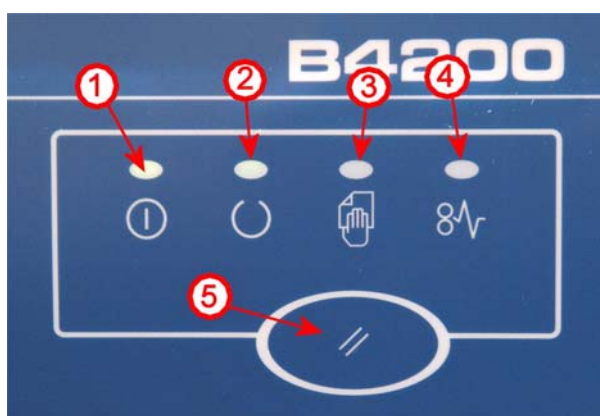

Εικ.1-1: Λυχνία LED και κουμπί εντολών εκτυπωτή

4. Ελέγξτε τη στάθμη της κασέτας τόνερ που εμφανίζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη σελίδα κατάστασης 2.

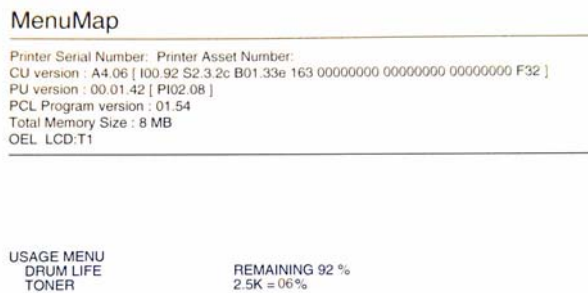

Εικ.1-2: Κατάσταση διάρκειας ζωής του τόνερ και του τυμπάνου

- Μετά την αντικατάσταση της κασέτας τόνερ, το ποσοστό γίνεται 100%.

1.3. Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ

Συνιστάται να καθαρίζετε τη σειρά φωτοδιόδων (LED) ενώ αλλάζετε την κασέτα τόνερ. Το τόνερ που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο εκτυπωτή είναι μια πολύ λεπτή και ξηρή σκόνη που περιέχεται στην κασέτα τόνερ. Κατά την εγκατάσταση της καινούργιας κασέτας, φροντίστε να έχετε κοντά σας ένα φύλλο χαρτιού ώστε να ακουμπήσετε τη χρησιμοποιημένη κασέτα τόνερ. Η απόρριψη της παλιάς κασέτας πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα, μέσα στη συσκευασία της νέας κασέτας. Τηρείτε τους κανονισμούς, τις συστάσεις κ.λ.π. που ισχύουν για την ανακύκλωση απορριμμάτων. Σε περίπτωση που ρίξετε σκόνη τόνερ, σκουπίστε ελαφρώς. Αν τα υπολείμματα τόνερ δεν απομακρυνθούν πλήρως, χρησιμοποιήστε ένα δροσερό και υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καυτό νερό ή διαλύτες οποιουδήποτε είδους. Με αυτόν τον τρόπο θα προκληθούν μόνιμα στίγματα.



Σε περίπτωση εισπνοής ή επαφής με τα μάτια, πιείτε λίγο νερό ή πλύνετε τα μάτια σας με άφθονο κρύο νερό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε για 10 λεπτά περίπου μέχρι κρυώσει η μονάδα φούρνου πριν ανοίξετε το άνω καπάκι.

1. Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης του άνω καπακιού του εκτυπωτή και ανοίξτε το πλήρως.



Αν ο εκτυπωτής ήταν ενεργοποιημένος, η μονάδα φούρνου μπορεί να είναι θερμή. Η περιοχή αυτή επισημαίνεται με σαφήνεια. Μην αγγίζετε.

2. Τραβήξτε τον έγχρωμο μοχλό στο δεξιό μέρος της κασέτας τόνερ προς το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή για να κλείσετε την κασέτα και στη συνέχεια αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη κασέτα τόνερ.

3. Για να εγκαταστήσετε τη νέα κασέτα, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται πάνω ή μέσα στο κουτί της νέας κασέτας τόνερ.

4. Καθαρίστε προσεκτικά τη σειρά φωτοδιόδων (LED) με το ειδικό καθαριστικό που παρέχεται μαζί με τη νέα κασέτα τόνερ ή με ένα μαλακό πανί.

5. Κλείστε το άνω καπάκι και πιέστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.

2. Αντικατάσταση κιτ τυμπάνου

2.1. Διάρκεια ζωής τυμπάνου απεικόνισης

Η διάρκεια ζωής του τυμπάνου απεικόνισης εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως είναι η θερμοκρασία και η υγρασία, ο τύπος χαρτιού που χρησιμοποιείται και ο αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται ανά εργασία. Το τύμπανο απεικόνισης πρέπει να επαρκεί για περίπου 25.000 σελίδες συνεχούς εκτύπωσης. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται κατά προσέγγιση εξαιτίας του διαφορετικού αριθμού σελίδων που εκτυπώνονται κάθε φορά, καθώς και των περιβαλλοντικών συνθηκών και του τύπου χαρτιού που χρησιμοποιείται, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε εκτύπωση.

2.2. Πότε πρέπει να αντικαθιστάτε το τύμπανο απεικόνισης

Όταν απαιτείται αλλαγή του τυμπάνου απεικόνισης, μόλις δηλαδή φτάσει στο 90% της διάρκειας ζωής του, η ενδεικτική λυχνία LED σφάλματος αναβοσβήνει με αργό ρυθμό. Αλλάξτε το τύμπανο απεικόνισης όταν οι εκτυπώσεις είναι αμυδρές ή όταν μειώνεται η ποιότητά τους. Ελέγξτε την κατάσταση της διάρκειας ζωής του τυμπάνου, όπως υποδεικνύεται και για την κατάσταση διάρκειας ζωής του τόνερ.

2.3. Αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης

Συνιστάται να αλλάξετε την κασέτα τόνερ και να καθαρίσετε τη σειρά φωτοδιόδων (LED) ταυτόχρονα με την αλλαγή του τυμπάνου απεικόνισης.



Η πράσινη επιφάνεια του τυμπάνου απεικόνισης στη βάση της κασέτας είναι πολύ εύθραυστη και φωτοευαίσθητη. Μην την αγγίζετε και μην την εκθέτετε σε φως δωματίου πάνω από 5 λεπτά. Αν είναι απαραίτητο να βγάλετε το τύμπανο από τον εκτυπωτή για περισσότερο από 5 λεπτά, τυλίξτε την κασέτα με μια μαύρη πλαστική σακούλα για να την προστατέψετε από το φως. Δεν επιτρέπεται η άμεση έκθεση του τυμπάνου στο φως του ήλιου ή σε χώρους με έντονο φωτισμό. Κρατάτε πάντα τη μονάδα τυμπάνου απεικόνισης από τις άκρες ή από το πάνω μέρος της.

1. Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης του άνω καπακιού του εκτυπωτή και ανοίξτε το πλήρως.



Αν ο εκτυπωτής ήταν ενεργοποιημένος, η μονάδα φούρνου μπορεί να είναι θερμή. Η περιοχή αυτή επισημαίνεται με σαφήνεια. Μην αγγίζετε.

2. Αφαιρέστε το τύμπανο απεικόνισης και την κασέτα τόνερ που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για να εγκαταστήσετε το νέο τύμπανο απεικόνισης, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται πάνω ή μέσα στο κουτί του νέου τυμπάνου απεικόνισης.

3. Καθαρίστε προσεκτικά τη σειρά φωτοδιόδων (LED) με το ειδικό καθαριστικό που παρέχεται μαζί με τη νέα κασέτα τόνερ ή με ένα μαλακό πανί. Για να εγκαταστήσετε τη νέα κασέτα τόνερ, ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται πάνω ή μέσα στο κουτί της νέας κασέτας τόνερ.

4. Κλείστε το άνω καπάκι και πιέστε το προς τα κάτω για να ασφαλίσει.

2.4. Επαναρύθμιση του μετρητή τυμπάνου

Μετά την αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης, ρυθμίστε εκ νέου το μετρητή του τυμπάνου ώστε η καταμέτρηση του αριθμού σελίδων που εκτυπώνονται στο τύμπανο απεικόνισης να είναι σωστή.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ανοίξτε το καπάκι του εκτυπωτή.

2. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί (5).

3. Κλείστε το καπάκι του εκτυπωτή και ελέγξτε αν ο μετρητής εμφανίζει το ποσοστό 99%.