

REF A11A01755

REAGENT 30 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE

# ABX Pentra Clean-Chem CP

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

## Καθαριστικό διάλυμα που χρησιμοποιείται σε βιοχημικούς αναλυτές της HORIBA Medical.

### Προοριζόμενη χρήση<sup>ab</sup>

ABX Pentra Clean-Chem CP είναι καθαριστικό διάλυμα που χρησιμοποιείται σε βιοχημικούς αναλυτές της HORIBA Medical.  
Χρήση κλινικών εργαστηρίων.

### Αντιδραστήρια

Το ABX Pentra Clean-Chem CP είναι έτοιμο για χρήση. Το αντιδραστήριο αυτό περιέχει υδροξείδιο του νατρίου (< 2%).

Το pH του διαλύματος είναι πάνω από 12.

Το ABX Pentra Clean-Chem CP πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παρόν φυλλάδιο. Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόδοσή.

### Χειρισμός στον Pentra C200

1. Αφαιρέστε το καπάκι της κασέτας, μεταφέρετε τον απαιτούμενο όγκο του ABX Pentra Clean-Chem CP στις δύο φιάλες DET. W: δειγματολήπτη και αναμείκτη.
2. Αλλάζετε το διάλυμα των φιαλών DET. W κάθε βδομάδα.

### Χειρισμός στον ABX Pentra 400 και τον Pentra C400

Αφαιρέστε το καπάκι της κασέτας και τοποθετήστε την στο ψυγείο αντιδραστηρίων του οργάνου.

<sup>a</sup>Τροποποίηση: τροποποίηση κεφαλαίου Προοριζόμενης χρήσης.

<sup>b</sup>Τροποποίηση: νέα μορφή φυλλαδίου.

<sup>c</sup>Τροποποίηση: τροποποίηση κατηγοριοποίησης.

### Απαιτούμενα μη παρεχόμενα υλικά

- Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής.
- Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.

### Φύλαξη και σταθερότητα

#### Σταθερότητα πριν το άνοιγμα:

Σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα, εφόσον φυλάσσεται στους 2-8°C.

#### Σταθερότητα μετά το άνοιγμα:

Αφού ανοιχτεί, ABX Pentra Clean-Chem CP παραμένει σταθερό για 45 ημέρες σε θερμοκρασία 2-8°C ή αφού τοποθετηθεί στον ψυχόμενο θάλαμο του αναλυτή ABX Pentra 400 ή στον κλινικό χημική αναλυτή Pentra C400.

### Διαχείριση αποβλήτων

Ανατρέξτε στις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.

### Γενικές προφυλάξεις<sup>c</sup>

- Το αντιδραστήριο αυτό προορίζεται μόνο για επαγγελματική διαγνωστική χρήση *in vitro*. Για εργαστηριακή χρήση.
- Μόνο για συνταγογραφημένη χρήση.
- Το αντιδραστήριο αυτό ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό αρ.1272/2008 (EC).

# ABX Pentra Clean-Chem CP

## ■ Προειδοποίηση

- H290:** Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
  - H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
  - H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  - P234:** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
  - P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  - P390:** Σκουπίστε το υλικό που τυχόν χυθεί για να αποφευχθούν υλικές ζημιές.
  - P406:** Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
  - P302 + P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
  - P332 + P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό.
  - P337 + P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
  - P305 + P351 + P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετεπροσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστετους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Αποφύγετε την κατάποση. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τις βλεννογόνους.
  - Λαμβάνετε τις τυπικές εργαστηριακές προφυλάξεις ασφαλούς χρήσης.
  - Οι κασέτες των αντιδραστηρίων είναι μίας μόνο χρήσης και πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.
  - Παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος που αφορά το αντιδραστήριο.
  - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει εμφανής ένδειξη βιολογικής, χημικής ή φυσικής φθοράς.
  - Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν τηρούνται οι συνιστώμενες συνθήκες φύλαξης, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας.
  - Ο χρήστης πρέπει να έχει εκπαιδευτεί από έναν αντιπρόσωπο της HORIBA Medical προτού επιχειρήσει να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.
  - Είναι ευθύνη των χρηστών να ελέγξουν εάν το έγγραφο αυτό αφορά το αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται.
  - Για τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο +33 (0)4 67 14 15 16.
  - Τυχόν σοβαρά περιστατικά που έχουν προκληθεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.