

REF A11A01755

REAGENT 30 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

ABX Pentra Clean-Chem CP

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

Rengöringslösning för användning på HORIBA Medical kliniskt-kemiska analysinstrument.

Användningsområde^{ab}

ABX Pentra Clean-Chem CP är en rengöringslösning som används på HORIBA Medical kliniska kemianalysatorer.
Klinisk laboratorieanvändning.

Reagenser

ABX Pentra Clean-Chem CP är redo att användas. Detta reagens innehåller natriumhydroxid (< 2%). Lösningens pH-värde är större än 12.

ABX Pentra Clean-Chem CP ska användas i enlighet med denna bipacksedel. Om anvisningarna inte följs kan tillverkaren inte garantera prestandan.

Hantering i Pentra C200

1. Ta bort locket från kassetten, överför erforderlig volym av ABX Pentra Clean-Chem CP i de båda DET. W-flaskorna: sond och mixer.
2. Byt lösningen i DET. W-flaskorna varje vecka.

Hantering i ABX Pentra 400 och Pentra C400

Ta bort locket från kassetten, placera kassetten i det kylda reagensfacket i instrumentet.

Material som behövs men ej medföljer

- Automatiskt kliniskt-kemiskt analysinstrument.
- Vanlig laboratorieutrustning.

^aModifiering: modifiering av kapitlet Användningsområde.

^bModifiering: ny broschyrform.

^cModifiering: modifiering av klassificering.

Förvaring och stabilitet

Stabilitet i oöppnad förpackning:

Stabila fram till det utgångsdatum som anges på etiketten om de förvaras i temperaturintervallet 2-8°C.

Stabilitet i öppnad förpackning:

När den väl öppnats, ABX Pentra Clean-Chem CP är stabil i 45 dagar vid 2-8°C eller installerad i kylfacket på ABX Pentra 400 eller Pentra C400 klinisk-kemiska analysatorer.

Avfallshantering

Följ gällande föreskrifter.

Allmänna försiktighetsåtgärder^c

- Detta reagens är endast avsett för yrkesmässig *in vitro*-diagnostik.
För laboratorieanvändning.
- Endast avsedd för bruksanvisningar.
- Denna reagens är klassificerad som hälsofarlig i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

ABX Pentra Clean-Chem CP

■ Varning

H290: Kan vara korrosivt för metaller.

H315: Irriterar huden.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

P234: Förvaras endast i originalbehållaren.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P390: Sug upp spill för att undvika materiella skador.

P406: Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

P302 + P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P332 + P313: Vid hudirritation: Sök läkarvård.

P337 + P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

- Får ej förtäras. Undvik kontakt med hud och slemhinnor.
- Följ sedvanliga försiktighetsåtgärder för laboratoriearbete.
- Reagenskassetterna är endast för engångsbruk och ska avfallshanteras enligt gällande lokala föreskrifter.
- Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.
- Använd inte produkten om det finns synliga tecken på biologisk, kemisk eller fysisk skada.
- Använd inte produkten om de rekommenderade lagringsförhållandena, inklusive temperatur, inte följs.
- Användare måste utbildas av en HORIBA Medical-representant innan de försöker använda produkten.
- Användaren är skyldig att kontrollera att detta dokument är tillämpligt för det reagens som används.
- För teknisk support ringer du +33 (0)4 67 14 15 16.
- Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren och/eller patienten är etablerad.