

REF 1300036420

CLEANER 1 x 4,5 L

IVD CE


 HORIBA ABX SAS
 Parc Euromédecine
 Rue du Caducée
 BP 7290
 34184 Montpellier Cedex 4
 FRANCE

Yumizen G CLEANER

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

Solução de lavagem.

Uso previsto ^{a b}

Yumizen G CLEANER é uma solução de lavagem usada para manutenção e limpeza diárias de analisadores totalmente automatizados de coagulação Yumizen G Linha durante uso de rotina. Usar somente para diagnóstico *in vitro*.

Reagentes ^c

Yumizen G CLEANER está pronto para uso. É um surfactante usado para manutenção e limpeza diárias do analisador de coagulação.

Estabilizador <0,5%

Yumizen G CLEANER deve ser usado de acordo com este aviso. O fabricante não oferece garantias de desempenho se utilizado de outra forma.

Manuseio ^d

1. Deixe o tanque em repouso no mínimo 30 min (temperatura ambiente).
2. Consulte o capítulo sobre manutenção do manual do usuário do instrumento para instalar o novo tanque.

Materiais necessários, mas não fornecidos ^e

- Analisador de hemostasia
- Recomenda-se o uso de analisadores HORIBA Medical (Yumizen G Linha).
- Equipamentos padrão de laboratório

Armazenamento e estabilidade

Estabilidade antes da abertura

Estabilidade até a data de validade indicada no rótulo, se armazenado a 15 - 35°C.

Estabilidade após a abertura

	15 - 35°C
Yumizen G CLEANER	60 dias

Gerenciamento de resíduos ^f

Consulte os requisitos legais locais.

^aModificação: parágrafo "Uso previsto" alterado.

^bModificação: novo layout do folheto.

^cModificação: parágrafo "Reagentes" alterado.

^dModificação: parágrafo "Manuseio" alterado.

^eModificação: parágrafo "Materiais necessários, mas não fornecidos" alterado.

^fModificação: capítulo adicionado.

Yumizen G CLEANER

Precauções gerais ⁹

- Este produto deve ser usado para diagnóstico *in vitro* apenas por pessoas autorizadas.
Para uso em laboratório.
- Apenas para o uso prescrito.
- Este reagente é classificado como não perigoso de acordo com a regulamentação (EC) N°.1272/2008.
- Não use a boca para pipetagem.
- Não reconstitua os produtos.
- Não engolir. Evite contato com pele e mucosas.
- Siga as precauções laboratoriais padrão de uso.
- Os frascos do produto devem ser descartados após o uso. O descarte de material residual deve ser feito de acordo com diretrizes locais.
- Consulte a ficha técnica de segurança associada ao produto.
- Não utilize o produto se houver evidências de deterioração biológica, química ou física.
- Não utilize o produto se as recomendações de condições de armazenamento, incluindo temperatura, não são seguidas.
- O usuário deve ser treinado por um representante da HORIBA Medical antes de tentar operar o dispositivo.
- É responsabilidade do usuário verificar se este documento se aplica ao produto usado.
- Para obter assistência técnica, ligue para +33 (0)4 67 14 15 16.
- Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente do país de residência do usuário e/ou do paciente.
- A utilização de analisadores de hemostasia de terceiros pode causar riscos de desarmonização do sistema.
- É responsabilidade do usuário avaliar o risco da utilização de analisadores de hemostasia de terceiros.

⁹Modificação: parágrafo "Precauções gerais" alterado.