

Yumizen G SORB

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

REF 1300036418

CLEANER 12 x 15 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Rozwór do mycia.

Przeznaczenie ^{a b}

Yumizen G SORB jest roztworem podchlorynu stosowanym do codziennej konserwacji i czyszczenia w pełni zautomatyzowanych analizatorów krzepnięcia Yumizen G Wiersz podczas pomiarów diagnostycznych. Wyłącznie do stosowania w diagnostyce *in vitro*.

Odczynniki ^c

Yumizen G SORB jest gotowy do użycia. Jest roztworem do mycia, który skutecznie wymywa pozostałości komórkowe, białka i trójglicerydy poprzez rozpuszczanie w warunkach tlenowych i solubilizację detergentu.

Podchloryn sodu	< 1,0%
Wodorotlenek potasu	< 9 g/L
Detergent	< 1,0%

Yumizen G SORB należy używać zgodnie z niniejszą ulotką. Producent nie może zagwarantować właściwego działania produktu, jeśli zostanie on użyty w sposób inny od podanego.

Postępowanie z produktem ^d

1. Poczekać, aż odczynniki osiągną temperaturę roboczą.

2. **Wyłącznie do analizatorów automatycznych:** umieścić odczynnik bez zatyczki w analizatorze w następujący sposób:

Typ uchwytu	Typ zbiornika
Uchwyt na odczynnik	1 x oryginalna fiolka
Uchwyt pomocniczy	1 x oryginalna fiolka

W celu zapewnienia optymalnego działania odczynnik należy wyjąć z analizatora po użyciu, zamknąć fiolkę i przechowywać w temperaturze 2 - 8°C.

Należy zachować ostrożność, by nie zamienić zatyczek produktu z zatyczkami od innych produktów.

Wymagane wyposażenie niewchodzące w skład produktu ^e

- Analizator koagulologiczny
- Zalecane są analizatory HORIBA Medical (Yumizen G Wiersz).
- Standardowy sprzęt laboratoryjny

Przechowywanie i stabilność

Stabilność przed otwarciem

Zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie pod warunkiem przechowywania w temperaturze 2 - 8°C.

^aModyfikacja: zmieniono sekcję § „Przeznaczenie”.

^bModyfikacja: nowy format ulotki.

^cModyfikacja: zmieniono sekcję § „Odczynniki”.

^dModyfikacja: dodano rozdział.

^eModyfikacja: zmieniono sekcję § „Wymagane wyposażenie niewchodzące w skład produktu”.

Yumizen G SORB

Stabilność po otwarciu

	20 - 25°C
Yumizen G SORB	21 dni

Stabilność w analizatorze

Analizatory automatyczne

	20 - 25°C	15 - 19°C
Yumizen G SORB	21 dni	21 dni

Postępowanie z odpadami ^d

Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Ogólne środki ostrożności ^f

- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki *in vitro*.
Do użytku laboratoryjnego.
- Stosować zgodnie z zaleceniami.
- Ten odczynnik został sklasyfikowany jako szkodliwy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
- **Ostrzeżenie**
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H290: Może powodować korozję metali.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P390: Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P406: Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.
P501: Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332 + P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zwrócić się o pomoc lekarską.
P337 + P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

- Nie pipetować ustami.
- Nie uzupełniać produktów.
- Nie połykać. Unikać zanieczyszczenia skóry i błon śluzowych.
- Korzystając z produktu, należy stosować standardowe laboratoryjne środki ostrożności.
- Po użyciu należy zutylizować fiolki produktu. Utylizacja wszelkich odpadów powinna być prowadzona zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi.
- W celu uzyskania informacji należy skorzystać z karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) danego produktu.
- Nie należy używać produktu, jeżeli dostrzegalne są zmiany jego właściwości biologicznych, chemicznych czy fizycznych.
- Nie używaj produktu, jeżeli zalecenia dotyczące warunków przechowywania, włącznie z temperaturą, nie są spełnione.
- Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia użytkownik musi zostać przeszkolony przez przedstawiciela firmy HORIBA Medical.
- Użytkownik ma obowiązek upewnić się, czy niniejszy dokument dotyczy używanego produktu.
- W celu uzyskania pomocy technicznej zadzwoń pod numer +33 (0)4 67 14 15 16.
- Każdy poważny incydent wynikający ze stosowania wyrobu należy zgłaszać producentowi i organowi kraju właściwemu dla miejsca pobytu użytkownika lub pacjenta.
- Stosowanie analizatorów do oznaczania hemostazy innych firm może spowodować utratę harmonizacji systemu.
- Obowiązkiem użytkownika jest ocena ryzyka stosowania analizatorów do oznaczania hemostazy innych firm.

^dModyfikacja: dodano rozdział.

^fModyfikacja: zmieniono sekcję § „Ogólne środki ostrożności”.