

Yumizen G SORB

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

REF 1300036418

CLEANER 12 x 15 mL

IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Solución de lavado

Uso previsto ^{a b}

Yumizen G SORB es una solución de lavado de hipoclorito que se emplea para la limpieza y el mantenimiento diario de los analizadores de hemostasia totalmente automáticos Línea Yumizen G durante las pruebas de diagnóstico.

Solo para diagnóstico *in vitro*.

Reactivos ^c

Yumizen G SORB está listo para su uso.

Es una solución de lavado que limpia eficazmente los restos de células, proteínas y triglicéridos mediante la degradación oxidativa y la solubilización por el detergente.

Hipoclorito de sodio	< 1,0%
Hidróxido potásico	< 9 g/L
Detergente	< 1,0%

Yumizen G SORB debe utilizarse siguiendo este documento.

El fabricante no puede garantizar su funcionamiento si se utiliza de otro modo.

Manipulación ^d

1. Espere a que los reactivos alcancen la temperatura de trabajo.

2. **Solo para analizadores automáticos:** coloque el reactivo en el instrumento sin tapa como se indica a continuación:

Tipo de soporte	Tipo de depósito
Soporte de reactivo	1 x vial original
Soporte auxiliar	1 x vial original

Para obtener un rendimiento óptimo, retire el reactivo del instrumento tras su uso, cierre el vial y almacénalo a 2 - 8°C.

Debe procurarse no intercambiar los tapones con los de otros productos.

Materiales necesarios no suministrados ^e

- Analizador de hemostasia
- Se recomiendan los analizadores de HORIBA Medical (Línea Yumizen G).
- Equipamiento estándar de laboratorio

Conservación y estabilidad

Estabilidad antes de la apertura

Se mantiene estable hasta la fecha de caducidad que se indica en la etiqueta si se guarda entre 2 - 8°C.

^aModificación: cambio en el apartado "Uso previsto".

^bModificación: nuevo formulario de folleto.

^cModificación: modificación del apartado "Reactivos".

^dModificación: capítulo añadido.

^eModificación: modificación del apartado "Materiales necesarios no suministrados".

Yumizen G SORB

Estabilidad después de la apertura

	20 - 25°C
Yumizen G SORB	21 días

Estabilidad en el equipo

Analizadores automáticos

	20 - 25°C	15 - 19°C
Yumizen G SORB	21 días	21 días

Tratamiento de los residuos ^d

Consulte las normas legales locales.

Precauciones generales ^f

- Este producto está indicado exclusivamente para el diagnóstico *in vitro* profesional.
Para uso en laboratorio.
- Venta exclusiva a profesionales sanitarios.
- Este reactivo está clasificado como peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) N°.1272/2008.
- **Advertencia**
H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H290: Puede ser corrosivo para los metales.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P390: Absorba los derrames para evitar daños en los materiales.
P405: Guardar bajo llave.
P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.
P501: Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclararcuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, silleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- No pipetee con la boca.

- No rellene los envases.
- No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas.
- Siga las precauciones estándar de laboratorio para su uso.
- Los viales del producto deben desecharse después de su uso. La eliminación de todo el material de desecho deberá realizarse de conformidad con las directrices locales.
- Consulte la ficha de datos de seguridad (SDS) correspondiente del producto.
- No utilice el producto si presenta signos visibles de deterioro biológico, químico o físico.
- No utilice el producto si no se siguen las condiciones de almacenamiento recomendadas, incluida la temperatura.
- El usuario debe estar capacitado por un representante de HORIBA Medical antes de intentar utilizar el producto.
- Es responsabilidad del usuario comprobar que este documento sea aplicable al producto utilizado.
- Para asistencia técnica, puede llamar al +33 (0)4 67 14 15 16.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto deberá ser comunicado al fabricante ya la autoridad competente del país en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
- El uso de analizadores de hemostasia de terceros puede dar lugar a un riesgo de desarmonización del sistema.
- Es responsabilidad del usuario evaluar el riesgo de utilizar analizadores de hemostasia de terceros.

^dModificación: capítulo añadido.

^fModificación: modificación del apartado "Precauciones generales".