

Yumizen G SORB

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

REF 1300036418

CLEANER 12 x 15 mL

IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Roztwór płuczący.

Przeznaczenie ^a

Yumizen G SORB jest roztworem podchlorynu stosowanym do codziennej konserwacji i czyszczenia w pełni zautomatyzowanych analizatorów krzepnięcia Linia Yumizen G podczas pomiarów diagnostycznych. Wyłącznie do stosowania w diagnostyce *in vitro*.

Odczynniki ^b

Yumizen G SORB jest w stanie gotowym do użycia. Jest roztworem do mycia, który skutecznie wymywa pozostałości komórkowe, białka i trójglicerydy poprzez rozpuszczanie w warunkach tlenowych i solubilizację detergentu.

Podchloryn sodu	< 1,0%
Wodorotlenek potasu	< 1,0%
Detergent	< 1,0%

Yumizen G SORB należy używać zgodnie z niniejszą ulotką. Producent nie może zagwarantować właściwego działania produktu, jeśli zostanie on użyty w sposób inny od podanego.

Postępowanie z produktem

1. Poczekaj, aż odczynniki osiągną temperaturę roboczą.

2. **Wyłącznie do analizatorów automatycznych:** umieść odczynnik bez zatyczki w analizatorze w następujący sposób:

Typ uchwytu	Typ zbiornika
Uchwyt na odczynniki	1 x oryginalna fiolka
Uchwyt pomocniczy	1 x oryginalna fiolka

W celu zapewnienia optymalnego działania odczynnik należy wyjąć z analizatora po użyciu, zamknąć fiolkę i przechowywać w temperaturze 2 - 8°C.

Należy zachować ostrożność, by nie zamienić zatyczek produktu z zatyczkami od innych produktów.

Wymagane wyposażenie niewchodzące w skład produktu

- Analizator do oznaczania hemostazy
- Analizatory HORIBA Medical (Linia Yumizen G) są zalecane.
- Standardowy sprzęt laboratoryjny

Przechowywanie i stabilność

Stabilność przed otwarciem

Zachowuje stabilność do daty ważności podanej na etykiecie pod warunkiem przechowywania w temperaturze 2 - 8°C.

Stabilność po otwarciu

	20 - 25°C
Yumizen G SORB	21 dni

^aModyfikacja: nowy format ulotki.

^bModyfikacja: zmieniono sekcję § „Odczynniki”.

Yumizen G SORB

Stabilność w analizatorze

Analizatory automatyczne

	20 - 25°C	15 - 19°C
Yumizen G SORB	21 dni	21 dni

Postępowanie z odpadami

Należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Ogólne środki ostrożności ^c

- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki *in vitro*.
Do użytku laboratoryjnego.
- Stosować zgodnie z zaleceniami.
- Ten odczynnik został sklasyfikowany jako szkodliwy w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.
- **Ostrzeżenie**
 - H315:** Działa drażniąco na skórę.
 - H319:** Działa drażniąco na oczy.
 - H290:** Może powodować korozję metali.
 - H412:** Działa szkodliwie na organizmy wodne, powoduje długotrwałe skutki.
 - P234:** Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 - P280:** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 - P390:** Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
 - P406:** Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej.
 - P501:** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.
 - P305 + P351 + P338:** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 - P302 + P352:** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 - P332 + P313:** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zwrócić się o pomoc lekarską.
 - P337 + P313:** W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- Nie pipetować ustami.
- Nie uzupełniać produktów.
- Nie połykać. Unikać zanieczyszczenia skóry i błon śluzowych.
- Korzystając z produktu, należy stosować standardowe laboratoryjne środki ostrożności.
- Po użyciu należy zutylizować fiolki produktu. Utylizacja wszelkich odpadów powinna być prowadzona zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi.
- W celu uzyskania informacji należy skorzystać z karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) danego produktu.
- Nie używać produktu, jeżeli można zaobserwować zmianę jego cech biologicznych, chemicznych lub fizycznych, co wskazuje na jego nieprzydatność do użytku.
- Nie należy używać tego produktu w przypadku nieprzestrzegania warunków magazynowania, w tym w zakresie temperatury.
- Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia użytkownik musi zostać przeszkolony przez przedstawiciela firmy HORIBA Medical.
- Użytkownik ma obowiązek upewnić się, czy niniejszy dokument dotyczy używanego produktu.
- W celu uzyskania pomocy technicznej zadzwoń pod numer +33 (0)4 67 14 15 16.
- Każdy poważny incydent wynikający ze stosowania wyrobu należy zgłaszać producentowi i organowi kraju właściwemu dla miejsca pobytu użytkownika lub pacjenta.
- Stosowanie analizatorów do oznaczania hemostazy innych firm może spowodować utratę harmonizacji systemu.
- Obowiązkiem użytkownika jest ocena ryzyka stosowania analizatorów do oznaczania hemostazy innych firm.

^cModyfikacja: zmieniono sekcję § „Ogólne środki ostrożności”.