

Yumizen G SORB

- Yumizen G800
- Yumizen G1500/G1550

REF 1300036418

CLEANER 12 x 15 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Solución de lavado.

Uso previsto ^a

Yumizen G SORB es una solución de lavado de hipoclorito que se emplea para la limpieza y el mantenimiento diario de los analizadores de hemostasia totalmente automáticos Gama Yumizen G durante las pruebas de diagnóstico.

Sólo para diagnóstico *in vitro*.

Reactivos ^b

Yumizen G SORB listo para su uso.

Es una solución de lavado que limpia eficazmente los restos de células, proteínas y triglicéridos mediante la degradación oxidativa y la solubilización por el detergente.

Hipoclorito de sodio	< 1,0%
Hidróxido potásico	< 1,0%
Detergente	< 1,0%

Yumizen G SORB debe utilizarse siguiendo este documento.

El fabricante no puede garantizar su funcionamiento si se utiliza de otro modo.

Manipulación

1. Espere a que los reactivos alcancen la temperatura de trabajo.

2. **Solo para analizadores automáticos:** coloque el reactivo en el instrumento sin tapa como se indica a continuación:

Tipo de soporte	Tipo de depósito
Soporte de reactivo	1 x vial original
Soporte auxiliar	1 x vial original

Para un rendimiento óptimo, retire el reactivo del instrumento después de usarlo, cierre el vial y guárdelo a 2 - 8°C.

Debe procurarse no intercambiar los tapones con los de otros productos.

Materiales necesarios pero no suministrados

- Analizador de hemostasia
- Se recomiendan analizadores HORIBA Medical (Gama Yumizen G).
- Equipamiento estándar de laboratorio

Conservación y estabilidad

Estabilidad antes de abrir

Permanece estable hasta su fecha de caducidad indicada en la etiqueta si se guarda entre 2 - 8°C.

Estabilidad después de la apertura

	20 - 25°C
Yumizen G SORB	21 días

^aModificación: formulario de folleto nuevo.

^bModificación: § "Reactivos" cambiado.

Yumizen G SORB

Estabilidad en el instrumento

Analizadores automáticos

	20 - 25°C	15 - 19°C
Yumizen G SORB	21 días	21 días

Tratamiento de los residuos

Consulte las normas legales locales.

Precauciones generales ^c

- Este producto está indicado exclusivamente para el diagnóstico *in vitro* profesional.
Para uso en laboratorio.
- Venta exclusiva a profesionales sanitarios.
- Este reactivo está clasificado como peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) N°.1272/2008.
- **Advertencia**
 - H315:** Provoca irritación cutánea.
 - H319:** Provoca irritación ocular grave.
 - H290:** Puede ser corrosivo para los metales.
 - H412:** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos de larga duración.
 - P234:** Conservar únicamente en el embalaje original.
 - P280:** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
 - P390:** Absorba los derrames para evitar daños en los materiales.
 - P406:** Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.
 - P501:** Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
 - P305 + P351 + P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
 - P302 + P352:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
 - P332 + P313:** En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
 - P337 + P313:** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- No pipetear con la boca.
- No rellene los envases.
- No ingerir. Evitar el contacto con la piel y las membranas mucosas.
- Siga las precauciones estándar de laboratorio para su uso.
- Los viales del producto deben desecharse después de su uso. La eliminación de todos los residuos se debe realizar según las normativas locales.
- Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) asociada con el producto.
- No utilice el producto si presenta signos visibles de deterioro biológico, químico o físico.
- No utilice el producto si no se han respetado las condiciones de almacenamiento recomendadas, incluida la temperatura.
- El usuario debe haber recibido capacitación por parte de un representante de HORIBA Medical antes de intentar utilizar el dispositivo.
- Es responsabilidad del usuario comprobar que este documento sea aplicable al producto utilizado.
- Para obtener asistencia técnica, puede llamar al +33 (0)4 67 14 15 16.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del país en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
- El uso de analizadores de hemostasia de terceros puede dar lugar a un riesgo de desarmonización del sistema.
- Es responsabilidad del usuario evaluar el riesgo de utilizar analizadores de hemostasia de terceros.

^cModificación: § "Precauciones generales" cambiado.