

## Utilização prevista

Destinado à utilização como padrão de lactato para padronização ou calibração de procedimentos de lactato oxidase e lactato. **Rx Only**

## Resumo e explicação

O padrão de lactato é preparado a partir de ácido láctico numa solução aquosa. O padrão fornece um nível de concentração de lactato dentro do intervalo de linearidade do procedimento de lactato oxidase e lactato. Foram adicionados estabilizadores e conservantes.

## Princípio

O padrão deve ser utilizado para calibrar a determinação de amostras desconhecidas por meio de um ensaio de lactato oxidase e lactato. Devem ser incluídos controlos para validar a calibração do ensaio.

## Ingredientes

Ingredientes reativos: Uma solução de lactato preparada a partir de ácido láctico numa solução aquosa. Foram adicionados conservantes. Consulte o rótulo do frasco para obter a concentração determinada para o padrão.

Precauções: Para utilização em diagnóstico *in vitro*. Manuseie com as mesmas precauções utilizadas para amostras humanas.

## Armazenamento e estabilidade

Armazene a 2-8°C. Mantém-se estável até à data de validade, quando hermeticamente fechado e armazenado a 2-8°C.

## Preparação

O padrão é fornecido sob a forma de um líquido pronto a utilizar.

## Procedimento

O padrão pode ser utilizado para padronizar o instrumento ou o ensaio, seguindo as instruções que acompanham o instrumento e o kit de reagentes utilizados.

Materiais fornecidos: Um padrão de lactato aquoso 5,0 mmol/L.

Materiais não fornecidos: Reagente e controlos de lactato oxidase e lactato Pointe.

Limitações: Os fatores que podem provocar resultados imprecisos são uma pipetagem inadequada e uma mistura incorreta.

## Valor padrão

O valor é de 5,0 mmol/L quando utilizado com o procedimento de lactato oxidase e lactato Pointe.

## Legenda dos símbolos

Utilizar até (AAAA-MM-DD)	Lote e código
Número de catálogo	Fabricante
Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i>	Limite de temperatura
Consulte as instruções de utilização	Marcação CE
<b>Rx Only:</b> Utilização apenas mediante receita médica	
Representante autorizado na Comunidade Europeia	

L7596-STD Fabricado por HORIBA Instruments Incorporated  
5449 Research Drive  
Canton, MI 48188 2°C-8°C

Fabricado por HORIBA Instruments Incorporated - Pointe Brand  
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

Representante Europeu Autorizado:  
Obelis s.a.  
Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BÉLGICA  
Tel.: (32)2.732.59.54 Fax: (32)2.732.60.03 e-mail: mail@obelis.net



## Certificada para executar reagentes

Os reagentes Pointe são certificados para serem fabricados de acordo com parâmetros especificados. Qualquer produto de reagente Pointe que não cumpra as especificações até à data de validade indicada será regularizado imediatamente sem quaisquer custos.