

Utilizarea prevăzută

Destinat utilizării ca standard pentru lactat pentru standardizarea sau calibrarea procedurilor de lactat oxidază, lactat. **Rx Only**

Rezumat și explicare

Standardul pentru lactat este preparat din acid lactic într-o soluție apoasă. Standardul oferă un nivel de concentrație de lactat în intervalul de linearitate al procedurii lactat oxidază, lactat. Stabilizatori și conservanți adăugați.

Principiul

Standardul trebuie utilizat pentru calibrarea determinării speciemenelor necunoscute cu un test de lactat oxidază, lactat. Trebuie incluse soluții de control pentru a valida calibrarea testului.

Ingrediente

Ingrediente reactive: O soluție de lactat preparată din acid lactic într-o soluție apoasă. Conservanți adăugați. Consultați eticheta pentru concentrația atribuită pentru standard.

Precauții: Pentru diagnostic *in vitro*. Manipulați cu aceleași măsuri de precauție utilizate pentru probele umane.

Depozitare și stabilitate

Depozitați la 2-8°C. Dacă este închis etan și depozitat la 2-8°C, este stabil până la data de expirare.

Prepararea

Standardul este furnizat sub formă de lichid gata de utilizare.

Procedură

Standardul trebuie utilizat pentru standardizarea instrumentului sau testului, urmând instrucțiunile furnizate împreună cu instrumentul și setul de reactivi folosit.

Materiale furnizate: Soluție apoasă Lactate Standard 5,0 mmol/L.








Materiale nefurnizate: Pointe Lactate Oxidase, reactiv pentru lactat și soluții de control.

Limitări: Factorii care pot provoca rezultate incorecte sunt pipetarea necorespunzătoare și amestecarea necorespunzătoare.

Valoare standard

Valoarea este 5,0 mmol/L când se utilizează cu procedura Pointe Lactate Oxidase, Lactate.

Legendă simboluri

 A se utiliza până la (AAAA-LL-ZZ)	 Cod lot și serie
 Număr catalog	 Producător
 Dispozitiv medical pentru diagnostic <i>in vitro</i>	 Limită de temperatură
 Consultați instrucțiunile de utilizare	
Rx Only: Numai pentru utilizare pe bază de prescripție medicală	

REF L7596-STDProdus de
HORIBA Instruments Incorporated
5449 Research Drive
Canton, MI 48188Produs de HORIBA Instruments Incorporated - Pointe Brand
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

Reprezentant autorizat în Europa:

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Bruxelles, BELGIA

Tel: (32)2.732.59.54 Fax:(32)2.732.60.03 email: mail@obelis.net



Certificat pentru efectuarea reactivilor

Reactivii Pointe sunt certificați ca fiind fabricați în conformitate cu parametrii specificați. Orice produs reactiv Pointe care nu îndeplinește specificațiile prin data de expirare indicată va fi remediat imediat fără niciun cost suplimentar.

Rev. 06/23 P803-L7596-05-RO