

Uso previsto

Utilizzare come standard di lattato per la standardizzazione o la calibrazione delle procedure di dosaggio del lattato con lattato ossidasi. **Solo su prescrizione.**

Descrizione

Lo standard di lattato viene preparato a partire da acido lattico in soluzione acquosa. Lo standard fornisce un livello di concentrazione di lattato che rientra nell'intervallo di linearità della procedura per il lattato con lattato ossidasi. Stabilizzanti e conservanti aggiunti.

Principio

Lo standard deve essere utilizzato per calibrare la misurazione di campioni non noti utilizzando un test per lattato. Per validare la calibrazione del test è necessario includere dei controlli.

Ingredienti

Ingredienti reattivi: Soluzione di lattato preparata a partire da acido lattico in soluzione acquosa. Conservanti aggiunti. Per conoscere la concentrazione assegnata allo standard, consultare l'etichetta del flacone.

Precauzioni: Per fini diagnostici *in vitro*. Manipolare con le stesse precauzioni adottate per i campioni umani.

Conservazione e stabilità

Conservare a 2-8°C. Se chiuso ermeticamente e conservato a 2-8°C, lo standard resta stabile fino alla data di scadenza.

Preparazione

Gli standard vengono forniti sotto forma di liquido pronto all'uso.

Procedura

Utilizzare per standardizzare lo strumento o il test seguendo le istruzioni a corredo dello strumento e del kit di reagenti utilizzato.

Materiali in dotazione: Standard acquoso di lattato 5,0 mmol/L.









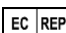
Materiali non in dotazione: Reagenti e controlli per lattato Pointe.

Limitazioni: Pipettare in modo improprio e miscelare non correttamente sono fattori che possono causare risultati imprecisi.

Valori dello standard

Il valore è di 50 mg/dl se utilizzato con il metodo per lattato di Pointe.

Legenda

 Utilizzare entro (aaaa-mm-gg)	 LOT Codice lotto e gruppo
 REF N. catalogo	 Fabbricante
 IVD Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i>	 Limiti di temperatura
 Consultare il manuale utente	Rx Only: utilizzare solo su prescrizione
 Marchio CE	 EC REP Rappresentante autorizzato per la Comunità

 REF L7596-STD	 Prodotto da HORIBA Instruments Incorporated 5449 Research Drive Canton, MI 48188	  2°C-8°C  IVD
--	---	--

Prodotto da HORIBA Instruments Incorporated- Pointe Brand
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

Rappresentante autorizzato per l'Europa:

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Bruxelles, BELGIO

tel: (32)2.732.59.54 fax:(32)2.732.60.03 email: mail@obelis.net



Reagenti certificati

I reagenti Pointe sono certificati per essere stati prodotti conformemente ai parametri specificati. Se entro la data di scadenza un reagente Pointe dovesse risultare non conforme alle specifiche, sarà prontamente sostituito senza alcun addebito.

Rev. 07/23 P803-L7596-05-IT