

Uso previsto

Da utilizzare come standard di microproteine per la standardizzazione o la calibrazione di procedure per la rilevazione di microproteine che utilizzano il rosso di pirogallolo. **Solo su prescrizione.**

Descrizione

Lo standard di microproteine viene preparato a partire da albumina bovina in soluzione acquosa. Lo standard fornisce un livello di concentrazione di microproteine che rientra nell'intervallo di linearità della procedura con rosso di pirogallolo. Stabilizzanti e conservanti aggiunti.

Principio

Lo standard deve essere utilizzato per calibrare la misurazione di campioni non noti utilizzando un test di microproteine al rosso di pirogallolo. Per validare la calibrazione del test è necessario includere dei controlli.

Ingredienti

Ingredienti reattivi: Soluzione microproteica preparata a partire da albumina bovina in soluzione acquosa. Conservanti aggiunti. Per conoscere la concentrazione assegnata allo standard, consultare l'etichetta del flacone.

Precauzioni: Per fini diagnostici *in vitro*. Manipolare con le stesse precauzioni adottate per i campioni umani.

Conservazione e stabilità

Conservare a 2-8°C. Se chiuso ermeticamente e conservato a 2-8°C, il prodotto resta stabile fino alla data di scadenza.

Preparazione

Gli standard vengono forniti sotto forma di liquido pronto all'uso.

Procedura

Utilizzare per standardizzare lo strumento o il test seguendo le istruzioni a corredo dello strumento e del kit di reagenti utilizzato.

Materiali in dotazione: Standard acquoso di microproteine 50 mg/dl.






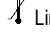


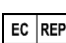
Materiali non in dotazione: Reagenti e controlli per microproteine Pointe al rosso di pirogallolo.


Limitazioni: Pipettare in modo improprio e miscelare non correttamente sono fattori che possono causare risultati imprecisi.

Valori dello standard

Il valore è di 50 mg/dl se utilizzato con la procedura per microproteine Pointe al rosso di pirogallolo.

Legenda

 Utilizzare entro (aaaa-mm-gg)	 Codice lotto e gruppo
 N. catalogo	 Fabbricante
 Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i>	 Limiti di temperatura
 Consultare il manuale utente	Rx Only: utilizzare solo su prescrizione
 Marchio CE	 Rappresentante autorizzato per la Comunità Europea

 P7582-STD

Prodotto da
HORIBA Instruments Incorporated
5449 Research Drive
Canton, MI 48188



Prodotto per HORIBA Instruments Incorporated: Pointe Brand
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

Rappresentante autorizzato per l'Europa:

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53

1030 Bruxelles, BELGIO

tel: (32)2.732.59.54 fax:(32)2.732.60.03 email: mail@obelis.net



Reagenti certificati

I reagenti Pointe sono certificati per essere stati prodotti conformemente ai parametri specificati. Se entro la data di scadenza un reagente Pointe dovesse risultare non conforme alle specifiche, sarà prontamente sostituito senza alcun addebito.