

Przeznaczenie

Przeznaczony do stosowania jako wzorzec mikroprotein do standaryzacji lub kalibracji procedur mikroprotein z czerwienią piragalolową. Rx Only

Streszczenie oraz wyjaśnienie

Standard mikrobiałka przygotowuje się z albuminy bydlęcej w roztworze wodnym. Standard podaje poziom stężenia mikroprotein w zakresie liniowości procedury z czerwienią piragalolową. Dodano stabilizatory i konserwanty.

Zasada działania

Wzorca należy używać do kalibracji oznaczania nieznanymi próbek przy użyciu testu mikrobiałkowego z czerwienią piragalolową. Należy uwzględnić kontrole w celu walidacji kalibracji testu.

Składniki

Składniki reaktywne: Roztwór mikroprotein przygotowany z albuminy bydlęcej w roztworze wodnym. Dodano konserwanty. Skonsultuj się z etykietą fiolki dla przypisanego stężenia dla standardu.

Środki ostrożności: Do użytku diagnostycznego *in vitro*. Postępować z takimi samymi środkami ostrożności, jak w przypadku próbek ludzkich.

Przechowywanie i stabilność

Przechowywać w temperaturze 2-8°C. Stabilny do daty ważności, jeśli jest szczelnie zamknięty i przechowywany w temperaturze 2-8°C.

Przygotowanie

Standard dostarczany jest w postaci gotowej do użycia cieczy.

Procedura

Wzorca należy używać do standaryzacji aparatu lub testu zgodnie z instrukcjami dołączonymi do aparatu i używanego zestawu odczynników.

Dostarczane materiały: Wodny wzorzec mikrobiałkowy 50 mg/dl.




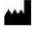





Materiały niedostarczane: Odczynnik i kontrole z mikroproteinami Pointe Pyragalol Red.


Ograniczenia: Czynniki, które mogą powodować niedokładne wyniki, to niewłaściwe pipetowanie i nieodpowiednie mieszanie.

Wartość podstawowa

Wartość wynosi 50 mg/dl, gdy jest stosowana z procedurą mikroproteinową czerwieni piragalolowej Pointe.

Symbole

 Termin przydatności (RRRR-MM-DD)	 Numer LOT i kod
 Numer katalogowy	 Producent
 Wyłącznie do diagnostyki <i>in vitro</i>	 Zakres temperatur
 Zapoznaj się z instrukcją użytkownika	Only Rx: Wyłącznie do profesjonalnego użytku
 Znak CE	 Autoryzowany przedstawiciel na Europie

 P7582-STD



Wyprodukowano przez
HORIBA Instruments Incorporated
5449 Research Drive Canton, MI
48188



Manufactured by HORIBA Instruments Incorporated: Pointe Brand
5449 Research Drive, Canton, MI 48188

European Authorized Representative:
Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: (32)2.732.59.54 Fax:(32)2.732.60.03 email: mail@obelis.net



Certyfikacja

Odczynniki Pointe są certyfikowane do produkcji zgodnie z określonymi parametrami. Każdy odczynnik Pointe, który nie spełnia specyfikacji w podanym terminie ważności, zostanie natychmiast i bezpłatnie wymieniony.

Rev. 6/23

P803-P7582-05-PL