

REF A11A01901

CAL 1 x 280 mL

IVD CE

**HORIBA ABX SAS**  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE

# ABX Pentra Reference 280 ml

- Pentra C400
- ABX Pentra 400

**Referenceopløsning, der bruges til kvantitativ bestemmelse af natrium, kalium og chlorid med ISE-modul.**

## Tilsløst anvendelse

**ABX Pentra Reference 280 ml** er del af et kalibratorsystem, der er beregnet til kvantitativ bestemmelse af natrium (Na<sup>+</sup>), kalium (K<sup>+</sup>) og chlorid (Cl<sup>-</sup>) på kliniske kemi-analysatorer, der er udstyret med ISE-modulet som tilvalg.

## Specifikationer

- **ABX Pentra Reference 280 ml** er en brugsklar opløsning.
- Det består af ét glas 280 mL.

### Bestanddele Koncentration

KCl 1,5 mol/L

- **ABX Pentra Reference 280 ml** skal anvendes i henhold til denne vejledning. Fremstilleren kan ikke garantere ydeevnen, hvis der anvendes andre fremgangsmåder.

## Håndtering

1. Tag flaskens låg af og sæt en hætte med sugerør på, fastgjort på instrumentet.
2. Kontroller at hvert reagens er tilsluttet det korrekte sugerør.

Der er yderligere oplysninger om isætning af reagenser i brugermanualen til instrumentet.

## Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt

- Automatiseret klinisk kemianalysator udstyret med ISE modulvalg.
- Standardlaboratorieudstyr.

## Opbevaring og stabilitet

### Stabilitet før åbning:

Stabil indtil udløbsdatoen på etiketten ved opbevaring ved 5-30°C. Skal beskyttes mod lys.

### Stabilitet efter åbning:

**ABX Pentra Reference 280 ml** er stabilt i 1 måned ved opbevaring ved 5-30°C sat i ISE-modulet på Pentra C400 eller ABX Pentra 400. Skal beskyttes mod lys.

## Affaldshåndtering

Der henvises til de lokale lovbestemmelser.

## Generelle forholdsregler<sup>a</sup>

- **ABX Pentra Reference 280 ml** bør kun anvendes til bestemmelse af kalibreringskurven.
- Denne kalibrator er kun beregnet til professionel *in-vitro*-diagnosticering. Til brug på laboratorier.
- Kun efter ordination.
- Dette reagens er klassificeret som farligt i henhold til direktiverne (EF) nr. 1272/2008.

<sup>a</sup>Modifikation: ændring af klassificering.

# ABX Pentra Reference 280 ml

## ■ Advarsel

**H317:** Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**P261:** Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

**P272:** Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.

**P280:** Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

**P302 + P352:** VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

**P333 + P313:** Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

**P321:** Særlig behandling (se [\*\*\*] på denne etiket).

**P362 + P364:** Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

**P501:** Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

- Pipetter ikke med munden.
- Må ikke indtages. Undgå kontakt med hud og slimhinder.
- Overhold forholdsreglerne for standard laboratoriebrug.
- Kalibratorglassene skal kasseres efter brug. Bortskaffelse af alt affald skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer.
- Se venligst det MSDS (sikkerhedsdatablad), der hører til kalibratoren.
- Produktet må ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på biologisk, kemisk eller fysisk forringelse.
- Brug ikke produktet, hvis de anbefalede opbevaringsforhold, herunder temperatur, ikke observeres.
- Brugeren skal være have fulgt et kursus med en HORIBA Medical repræsentant, før forsøg på at betjene udstyret.
- Det er brugerens ansvar at kontrollere, at dette dokument er relevant for den anvendte kalibrator.
- Ring til +33 (0)4 67 14 15 16 for teknisk assistance.
- Enhver alvorlig hændelse, som er indtruffet i forbindelse med brugen af udstyret, skal rapporteres til producenten og de kompetente myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.