

REF A11A01901

CAL 1 x 280 mL

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

ABX Pentra Reference 280 ml

- Pentra C400
- ABX Pentra 400

Referenslösning avsedd för kvantitativ bestämning av natrium, kalium och klorid med ISE-modulen.

Användningsområde

ABX Pentra Reference 280 ml är en del av ett kalibratorsystem avsett för kvantitativ bestämning av natrium (Na⁺), kalium (K⁺) och klorid (Cl⁻) i ett kliniskt-kemiskt analysinstrument utrustat med ISE-modulalternativ.

Egenskaper

- **ABX Pentra Reference 280 ml** är en lösning som är färdig att använda.
- Förpackningen innehåller en flaska om 280 mL.

Komponenter Koncentration

KCl 1,5 mol/L

- **ABX Pentra Reference 280 ml** ska användas i enlighet med denna bipacksedel. Om anvisningarna inte följs kan tillverkaren inte garantera prestandan.

Hantering

1. Avlägsna flaskans originallock och placera ett reagensrör med lock i instrumentet.
 2. Kontrollera att varje reagens är anslutet till rätt rör.
- Mer information om att installera reagenser finns i instrumentets användarmanual.

Material som behövs men ej medföljer

- Automatiskt kliniskt-kemiskt analysinstrument utrustat med ISE-modulalternativ.
- Vanlig laboratorieutrustning.

^aModifiering: modifiering av klassificering.

Förvaring och stabilitet

Stabilitet i oöppnad förpackning:

Stabila fram till det utgångsdatum som anges på etiketten om de förvaras i temperaturintervallet 5-30°C. Förvara skyddade från ljus.

Stabilitet i öppnad förpackning:

ABX Pentra Reference 280 ml är stabil i 1 månad om den förvaras vid 5-30°C installerad i ISE-modulen på Pentra C400 eller ABX Pentra 400. Förvara skyddade från ljus.

Avfallshantering

Följ gällande föreskrifter.

Allmänna försiktighetsåtgärder^a

- **ABX Pentra Reference 280 ml** ska endast användas för att fastställa kalibreringskurvan.
- Denna kalibrator är endast avsedd för yrkesmässig *in vitro*-diagnostik. För laboratorieanvändning.
- Endast avsedd för bruksanvisningar.
- Denna reagens är klassificerad som hälsofarlig i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

ABX Pentra Reference 280 ml

■ Varning

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P272: Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P333 + P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P321: Särskild behandling (se [***] på etiketten).

P362 + P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P501: Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

- Pipettera inte med munnen.
- Får ej förtäras. Undvik kontakt med hud och slemhinnor.
- Följ sedvanliga försiktighetsåtgärder för laboratoriearbete.
- Kalibratorflaskorna ska kasseras efter användning. Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till kalibratoren.
- Använd inte produkten om det finns synliga tecken på biologisk, kemisk eller fysisk skada.
- Använd inte produkten om de rekommenderade lagringsförhållandena, inklusive temperatur, inte följs.
- Användare måste utbildas av en HORIBA Medical-representant innan de försöker använda produkten.
- Användaren är skyldig att kontrollera att detta dokument är tillämpligt för den kalibrator som används.
- För teknisk support ringer du +33 (0)4 67 14 15 16.
- Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren och/eller patienten är etablerad.