

# Yumizen G CLEANER

- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

REF 1300036420

CLEANER 1 x 4,5 L

IVD CE



HORIBA ABX SAS  
Parc Euromédecine  
Rue du Caducée  
BP 7290  
34184 Montpellier Cedex 4  
FRANCE

## Solução de lavagem.

### Uso previsto <sup>a b</sup>

Yumizen G CLEANER é uma solução de lavagem usada para manutenção e limpeza diárias de analisadores totalmente automatizados de coagulação Linha Yumizen G durante uso de rotina. Usar somente para diagnóstico *in vitro*.

### Reagentes

Yumizen G CLEANER está pronto para uso. É um surfactante usado para manutenção e limpeza diárias do analisador de coagulação.

Estabilizador <0,5%

Yumizen G CLEANER deve ser usado de acordo com este aviso. O fabricante não oferece garantias de desempenho se utilizado de outra forma.

### Manuseio

1. Deixe o tanque em repouso no mínimo 30 min (temperatura ambiente).
2. Consulte o capítulo sobre manutenção do manual do usuário do instrumento para instalar o novo tanque.

### Materiais Necessários, mas não Fornecidos

- Analisador de hemóstase
- Recomenda-se o uso de analisadores HORIBA Medical (Linha Yumizen G).
- Equipamentos padrão de laboratório

<sup>a</sup>Modificação: novo layout do folheto.

<sup>b</sup>Modificação: novo instrumento adicionado.

### Armazenamento e Estabilidade

#### Estabilidade antes da abertura

Estabilidade até a data de validade indicada no rótulo, se for armazenado a 15 - 35°C.

#### Estabilidade após a abertura

	15 - 35°C
Yumizen G CLEANER	60 dias

### Gerenciamento de resíduos

Consulte os requisitos legais locais.

### Precauções gerais

- Este produto deve ser usado para diagnóstico *in vitro* apenas por pessoas autorizadas. Para uso em laboratório.
- Apenas para uso prescrito.
- Este reagente é classificado como não perigoso de acordo com a regulamentação (EC) N°.1272/2008.
- Não use a boca para pipetagem.
- Não reconstitua os produtos.
- Não engolir. Evite contato com pele e mucosas.
- Siga as precauções laboratoriais padrão de uso.
- Os frascos do produto devem ser descartados após o uso. O descarte de material residual deve ser feito de acordo com diretrizes locais.
- Consulte a ficha técnica de segurança associada ao produto.
- Não utilize o produto se houver evidências de deterioração biológica, química ou física.

## Yumizen G CLEANER

- Não utilize o produto se as recomendações de condições de armazenamento, incluindo temperatura, não são seguidas.
- O usuário deve ser treinado por um representante da HORIBA Medical antes de tentar operar o dispositivo.
- É responsabilidade do usuário verificar se este documento se aplica ao produto usado.
- Para obter assistência técnica, ligue para +33 (0)4 67 14 15 16.
- Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente do país de residência do usuário e/ou do paciente.
- A utilização de analisadores de hemóstase de terceiros pode causar riscos de desarmonização do sistema.
- É responsabilidade do usuário avaliar o risco da utilização de analisadores de hemostasia de terceiros.