

Yumizen G CaCl₂ 4

- Yumizen G200
- Yumizen G400 DDi/G405
- Yumizen G800/G800h/G850h
- Yumizen G1500/G1550/G1500h/G1550h

REF 1300036386

BUFFER 12 x 4 mL

IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

0,025 M-Kalziumchloridlösung für Koagulationstests.

Verwendungszweck ^{a b}

Yumizen G CaCl₂ 4 ist eine 0,025 M-Kalziumchloridpufferlösung, die als zusätzliches Reagenz für verschiedene Koagulationstests in entkalktem Plasma bei Koagulometrietests für alle menschlichen Populationen verwendet wird.

Nur als *In-vitro-Diagnostikum* zu verwenden.

Reagenzien

Yumizen G CaCl₂ 4 ist einsatzbereit.

Dies ist eine 0,025 M-Pufferlösung mit Stabilisator.

Kalziumchloriddihydrat < 4 g/L

Natriumazid < 1 g/L

Yumizen G CaCl₂ 4 sollte gemäß diesen Anweisungen verwendet werden.

Bei unsachgemäßer Verwendung kann der Hersteller eine einwandfreie Funktionsweise nicht gewährleisten.

Handhabung

1. Warten, bis das Reagenz die Arbeitstemperatur erreicht hat.
2. **Nur für automatische Analysegeräte:** Das Fläschchen ohne Verschluss in den Reagenzienhalter setzen.

Für eine optimale Leistung entfernen Sie das Reagenz nach der Verwendung aus dem Gerät, schließen das Fläschchen und lagern es bei 2 - 8°C.

Die Verschlüsse der Produkte dürfen nicht untereinander vertauscht werden.

Zusätzlich benötigtes Material ^c

- Hämostase-Analysegerät
- HORIBA Medical Analysegeräte (Yumizen G-Linie) empfehlen sich.
- **Yumizen G CaCl₂ 4** wird mit folgenden Reagenzien empfohlen:
 - Yumizen G APTT 4** (1300036377)
 - Yumizen G APTT Liq 2** (1300036379)
 - Yumizen G APTT Liq 4** (1300036381)
 - ACTICLOT® C** (1300081527)
 - ACTICLOT® Protein S** (1300081526)
 - Factor VIII deficient plasma** (38305 / 1300113523)
 - Factor IX deficient plasma** (38405 / 1300113524)
 - Factor XI deficient plasma** (38605 / 1300113525)
 - Factor XII deficient plasma** (38705 / 1300113526)
- Standard-Laborausrüstung

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit vor dem Öffnen

Haltbar bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum, wenn die Lagerung bei 2 - 8°C erfolgt.

Haltbarkeit nach dem Öffnen

	2 - 8°C
Yumizen G CaCl₂ 4	8 Wochen

^aÄnderung: Neues Beilageformular.

^bÄnderung: Neues Gerät hinzugefügt.

^cÄnderung: Abschnitt „Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien“ wurde geändert.

Yumizen G CaCl₂ 4

Haltbarkeit im Gerät

Automatische Analysegeräte

	15 - 19°C
Yumizen G CaCl₂ 4	8 Wochen

Halbautomatische Analysegeräte

	37°C
Yumizen G CaCl₂ 4	1 Tag

- Ernsthafte Störungen im Zusammenhang mit dem Gerät müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes gemeldet werden, in dem der Nutzer und/oder der Patient seinen Wohnsitz hat.
- Die Verwendung von Hämostase-Analysegeräten von Drittanbietern birgt die Gefahr einer Deharmonisierung des Systems.
- Der Benutzer muss das Risiko einer Verwendung von Hämostase-Analysegeräten von Drittanbietern beurteilen.

Entsorgung

- Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
- Dieses Produkt enthält weniger als 0,1% Natriumazid als Konservierungsmittel. Natriumazid kann mit Blei und Kupfer unter Bildung hochexplosiver Metallazide reagieren.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt ist nur für die professionelle *In-vitro*-Diagnostik bestimmt.
Zur Verwendung in einem Labor.
- Verschreibungspflichtig.
- Nicht mit dem Mund pipettieren.
- Die Produkte nicht nachfüllen.
- Produkt nicht einnehmen. Kontakt mit Haut und Schleimhäuten vermeiden.
- Es müssen die standardmäßigen Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Laborreagenzien beachtet werden.
- Die Produktfläschchen sind nach der Verwendung zu entsorgen. Laborabfall muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Hinweise hierzu enthält das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn deutliche Anzeichen für biologische, chemische oder physikalische Defekte vorliegen.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die empfohlenen Lagerungsbedingungen, einschließlich der Temperatur, nicht befolgt wurden.
- Nutzer müssen vor der Inbetriebnahme und Bedienung des Geräts von einem HORIBA Medical-Vertreter geschult werden.
- Der Benutzer hat sicherzustellen, dass dieses Dokument tatsächlich für das verwendete Produkt gilt.
- Eine technische Unterstützung erhalten Sie unter der Rufnummer +33 (0)4 67 14 15 16.