

Yumizen G CaCl₂ 4

INSTRUÇÕES DE USO

1300036386IU/01



SOLUÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO 0,025M PARA TESTES DE COAGULAÇÃO

Nº cat.: 1300036386 12 x 4 mL

NOME DO PRODUTO

Yumizen G CaCl₂ 4

USO PREVISTO

(Usar somente para diagnóstico in vitro)Yumizen G CaCl₂ 4 destina-se a testes de rastreio de hemostasia, tais como Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA).

RESUMO E PRINCÍPIO

O CaCl₂ é necessário para o teste de TTPA, que é um teste de rastreio geral da via intrínseca de coagulação. (Fatores: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I).

PRINCÍPIOS ATIVOS

Yumizen G CaCl₂ 4 é uma solução tampão de 0,025M com estabilizador.

PRECAUÇÕES

- A solução contém azida de sódio. Esta pode produzir azidas metálicas, que podem ser potencialmente explosivas em encanamentos metálicos. Cumpra as devidas precauções!
- Espécimes, amostras e todos os materiais que entrarem em contato com elas devem ser manuseados como se fossem capazes de transmitir infecção e eliminados com as devidas precauções.
- Não use o reagente depois da data de validade impressa no rótulo.
- Evite a contaminação microbiana do reagente. Caso contrário, os resultados podem ser errados.
- Todos os reagentes, resíduos e equipamentos de laboratório descartáveis utilizados devem ser considerados resíduos nocivos. Seu manuseio e eliminação devem ser feitos de acordo com o regulamento válido de processamento de materiais de risco.

PREPARAÇÃO

Yumizen G CaCl₂ 4 solução é fornecido pronto para uso.

INSTRUÇÕES DE USO

Siga as instruções descritas na bula dos reagentes TTPA: Yumizen G APTT 4; nº cat.:1300036377, e Yumizen G TTPA Liq 2; nº cat.:1300036379.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Yumizen G CaCl₂ 4 solução em frasco intacto é estável até sua data de validade apresentada no frasco, quando armazenado a de 2 a 8°C. A estabilidade depois de aberto no frasco original é mostrada na tabela abaixo:

T (°C)	37	15-19	2-8
Semana	1 dia	8	8

LIMITAÇÕES

A pessoa a instalar o reagente deve ser um profissional treinado no laboratório.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS

Yumizen G CaCl₂ 4 é recomendado para o seguinte teste de rastreio de hemostasia:

- Tempo de tromboplastina parcial ativado (Yumizen G TTPA 4; nº cat.: 1300036377)
- Tempo de tromboplastina parcial ativado (Yumizen G TTPA Liq 2; nº cat.: 1300036379)

FABRICANTE

**HORIBA ABX SAS**
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANCE