

REF A11A01769

REAGENT 25 mL



IVD CE

HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

ABX Pentra Etching CP

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

Rengøringsopløsning, der bruges på ISE-modulet i HORIBA kliniske kemi-analysatorer.

Tilsløbet anvendelse^a

ABX Pentra Etching CP er en opløsning der bruges til at rengøre elektroderne i ISE-modulet på kliniske kemi-analysatorer fra HORIBA.
Klinisk laboratorieanvendelse.

Reagenser

ABX Pentra Etching CP er klar til brug.
Dette produkt indeholder en opløsning af ammoniumfluorid.

ABX Pentra Etching CP skal anvendes i henhold til denne vejledning. Fremstillere kan ikke garantere ydeevnen, hvis der anvendes andre fremgangsmåder.

Håndtering

1. Tag hæften af kassetten.
2. Anbring **ABX Pentra Etching CP** på instrumentet:
 - For **Pentra C200**: Fyld et glas med **ABX Pentra Etching CP**. Sæt glasset i prøvebakken.
 - For **Pentra C400**: Anbring kassetten i instrumentets reagensrum ved stuetemperaturposition.
 - For **ABX Pentra 400**: Anbring kassetten i instrumentets reagensrum ved stuetemperaturposition.

Yderligere oplysninger findes i vedligeholdelsesprocedurerne i brugermanualen til Pentra C200 or ABX Pentra 400 eller Pentra C400 klinisk kemi-analysator.

Nødvendige, ikke vedlagte materialer

- Automatiseret klinisk kemianalysator udstyret med ISE modulvalg.
- Standardlaboratorieudstyr.

Opbevaring og stabilitet

Stabilitet før åbning:

Stabil indtil udløbsdatoen på etiketten ved opbevaring ved 15-25°C.

Stabilitet efter åbning:

Stabil i 1 måned ved 15-25°C, hvis det lukkes øjeblikkeligt, og kontaminering undgås.

Affaldshåndtering

Der henvises til de lokale lovbestemmelser.

Generelle forholdsregler^b

- Dette reagens er kun beregnet til professionel *in-vitro*-diagnosticering.
Til brug på laboratorier.
- Kun efter ordination.
- Dette reagens er klassificeret som farligt i henhold til direktiverne (EF) nr. 1272/2008.

^aModifikation: ny form på indlægsseddel.

^bModifikation: ændring af klassificering.

ABX Pentra Etching CP

■ Advarsel

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

P264: Vask hænderne grundigt efter brug.

P280: Bær beskyttelseshandsker eller beskyttelsestøj og øjne/ansigtsbeskyttelse.

P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P332 + P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P362 + P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsætskyllning.

P337 + P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

- Må ikke indtages. Undgå kontakt med hud og slimhinder.
- Overhold forholdsreglerne for standard laboratoriebrug.
- Reagenskassetterne er beregnet til engangsbrug og skal kasseres i overensstemmelse med lokale lovbestemmelser.
- Se sikkerhedsdatabladet, som følger med reagenset.
- Produktet må ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på biologisk, kemisk eller fysisk forringelse.
- Brug ikke produktet, hvis de anbefalede opbevaringsforhold, herunder temperatur, ikke observeres.
- Brugeren skal være have fulgt et kursus med en HORIBA repræsentant, før forsøg på at betjene udstyret.
- Det er brugerens ansvar at kontrollere, at dette dokument er relevant for det anvendte reagens.
- Ring til +33 (0)4 67 14 15 16 for teknisk assistance.
- Enhver alvorlig hændelse, som er indtruffet i forbindelse med brugen af udstyret, skal rapporteres til producenten og de kompetente myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.