

ABX Cleaner 1L

Mikrobiološki status

Nije primjenjivo.

Opis i sastav

Opis:

Bistra i bezbojna do svijetložućkasta vodena otopina.

Sastav:

Organski pufer	< 5%
Proteolitički enzim	< 1%
Konzervans	< 1%

Pohrana i stabilnost

- **Uvjeti pohrane (prije otvaranja):** 18-25°C (65-77°F). Ne zamrzavati.
- **Stabilnost nakon otvaranja:** 3 mjeseci maksimalno na 18-25°C (65-77°F) nakon otvaranja i unutar roka trajanja.
- **Rok trajanja:** pogledajte „rok trajanja“ na etiketi pakiranja reagensa.

Materijali koji su potrebni, ali nisu uključeni

- Automatizirani hematološki analizator.
- Standardna laboratorijska oprema.

Uzorak

Nije primjenjivo.

Postupak ^a

Ovaj reagens je spreman za upotrebu.

Postupak za reagens sa zapušačem i slamkom

Reagens sa zapušačem i slamkom koristi se na:

- ABX Pentra 60
- ABX Pentra 60 C+
- Pentra ES 60

- Pentra MS 60
- Pentra MS CRP
- ABX Pentra XL 80
- Pentra XLR
- Yumizen H500 OT / CT / H550
- Yumizen H500 CRP
- Yumizen H500E OT / CT / H550E

1. Pogledajte korisnički priručnik da identificirate **ABX Cleaner 1L** pomoću čitača barkoda ili ručno.
2. Otvorite vratašca odjeljka za reagens.
3. Po potrebi izvadite prazni proizvod **ABX Cleaner 1L** iz odjeljka za reagens.
4. Otvorite novu bocu reagensa.
5. Umetnite slamku sklopa zatvarača u bocu.
6. Pritegnite sklop zatvarača kako biste postigli odgovarajuće brtvljenje.
7. Postavite **ABX Cleaner 1L** u odjeljak za reagens u instrumentu.
8. Zatvorite vratašca odjeljka za reagens.

Slijedite upute prikazane na softveru instrumenta. Pogledajte korisnički priručnik instrumenta za postupke detaljne analize i kontrole.

Metodologija

ABX Cleaner 1L: kombinirano djelovanje proteolitičkog enzima s deterdžentom eliminira ostatke proteina i sprječava da dođe do začepjenja i/ili blokiranja hidrauličkih cijevi. Također se koristi za razgrađivanje naslaga proteina u komorama za brojanje i otvorima.

Radne karakteristike i ograničenja

Nije primjenjivo.

Izračun i tumačenje analitičkih rezultata

Nije primjenjivo.

^aIzmjene: dodan novi instrument.

ABX Cleaner 1L

Promjene postupka i funkcionalnosti

Oštećenje pakiranja

U slučaju oštećenja zaštitnog pakiranja, nemojte koristiti **ABX Cleaner 1L** ako postoji mogućnost da je oštećenje utjecalo na funkcionalnost proizvoda.

Znakovi propadanja

Ako primijetite bilo koje znakove fizikalnog ili kemijskog propadanja (zamućenje, promjena boje i sl.), **ABX Cleaner 1L** treba zamijeniti.

Temperaturna ograničenja

Nemojte koristiti proizvod **ABX Cleaner 1L** ako je zamrznut ili je čuvan na visokim temperaturama. Prije upotrebe proizvoda **ABX Cleaner 1L** provjerite je li dostigao uvjete radne temperature opisane u korisničkom priručniku instrumenta.

Unutarnja kontrola kvalitete

Nije primjenjivo.

Sljedivost kalibratora i kontrolnih materijala

Nije primjenjivo.

Referentni intervali

Nije primjenjivo.

