

Hämatologiegeräte (für die In-vitro-Diagnostik)

ABX Minoclair

15/04/2010
A95A00029IDE

REF 0401005 (0,5 L)

REAGENT 0,5 L

IVD 



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

Ausschließliche Verwendung:

ABX Micros ABC Vet
ABX Micros CRP/CRP200
ABX Micros 60
ABX Micros ES60/ESV60
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
Pentra MS60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120/DF 120
ADVIA 60

1. Funktionen

Reinigungs- und Bleichlösung für Geräte zur Blutzellenzählung^a.

Bei der Verwendung des Gerätes sind folgende Verfahren zu beachten:

Prinzip der Methode, spezifische Leistungsmerkmale der Analysen: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

2. Lagerung & Haltbarkeit

Lagerung: bei 18 °C bis 25 °C.

Haltbarkeit nach dem Öffnen der Flasche: maximal 6 Monate.

Verfallsdatum: siehe Angabe auf dem Etikett der Reagenzienverpackung.

3. Messungen, Verfahren & Ergebnisse

Gebrauchsanleitung: siehe Kapitel „Wartung & Fehlerbehebung“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Messverfahren: siehe Kapitel „Technologie“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Ergebnisse: siehe Benutzerhandbuch des Gerätes.

Leistungsdaten: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Hinweis: Wenn sich die Leistungsdaten ändern sollten, wenden Sie sich bitte an Ihre Vertretung von HORIBA Medical.

4. Zusammensetzung & Vorsichtsmaßnahmen

Zusammensetzung:

Natriumhypochlorit:11,4 % mit 13 % Aktivchlor
Natriumhydroxid:...0,35 %

pH-Wert: 12,5 +/- 0,5 (T = 20 °C)

Widerstand: Keine Angabe

Beschreibung: Gelbliche Flüssigkeit.

Vorsichtsmaßnahmen:

C - Ätzend

R35: Verursacht schwere Verätzungen.

S26: Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

S45: Bei einem Unfall oder bei Unwohlsein wenden Sie sich umgehend an einen Arzt (legen Sie möglichst das Etikett vor).

S60: Diese Substanz und ihr Behälter sind als Sondermüll zu entsorgen.

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe tragen. Einatmen oder Schlucken des Produktes kann gesundheitsschädigend sein. Flasche nach der Verwendung geschlossen halten. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagens.

5. Grenzen der Methode & Abfallentsorgung

Grenzen der Methode: siehe Kapitel „Spezifikationen“ im Benutzerhandbuch des Gerätes.

Sichere Abfallentsorgung: Bei der Neutralisation und Entsorgung von Abfall sind die Laborvorschriften zu beachten. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt des Reagens.

6. Ausschließlich bei der konzentrierten Reinigung zu verwenden:

ABX Minoclaire kann auch als Desinfektions- und Reinigungsmittel für Geräte zur Blutzellenzählung verwendet werden. Siehe Kapitel „Konzentrierte Reinigung“ im Benutzerhandbuch der folgenden Geräte: ABX Micros ABC Vet, ABX Micros 60, ABX Micros ES60, ABX Micros ESV60, ABX Micros CRP, ABX Micros CRP200, ABX Pentra 60, ABX Pentra 60C+, Pentra ES60, ABX Pentra 80, ABX Pentra XL 80, ABX Pentra 120, ABX Pentra 120 Retic, ABX Pentra DX 120, ABX Pentra DF 120, ADVIA 60, Pentra MS60^a.

^a.Änderung von Index H bis I: Pentra MS60 hinzugefügt.