

ABX Minocclair 0.5L

REF 0401005

REAGENT 0,5 л

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine
Rue du Caducée
BP 7290
34184 Montpellier Cedex 4
FRANCE

- ABX Micros 60
- ABX Micros ES60 / ESV60
- ABX Pentra 60 / 60C+
- ABX Pentra XL80
- Pentra XLR
- Pentra DX Nexus / DF Nexus
- Pentra ES60 / MS60 / MS CRP
- Micros Care ST
- Microsemi CRP
- Yumizen H500 OT / CT / H550
- Yumizen H1500 / H2500

Гематологические аппараты (для диагностики *in vitro*)

Назначение ^{a b c}

ABX Minocclair 0.5L — это химический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики *in vitro* и разработанный для очистки анализаторов крови HORIBA Medical.

Предназначено для использования в клинических лабораториях.

Предупреждения и меры предосторожности ^d

- Раствор **ABX Minocclair 0.5L** предназначен только для профессиональной диагностики *in vitro*.
Предназначено для использования в лабораторных условиях.
- Пользователь обязан проверить соответствие настоящего документа назначению продукта.
- Согласно нормативному документу (ЕС) N°.1272/2008 этот реагент считается вредным веществом.
- **Предупреждение**
H290: Может вызывать коррозию металлов.
H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
P234: Хранить только в оригинальной упаковке.
P273: Не допускать попадания в окружающую среду.
P390: Абсорбировать пролившееся вещество, чтобы не допустить повреждение материалов.
P406: Хранить в коррозионнотойком контейнере контейнере с коррозионнотойким вкладышем.
- При работе с химическими веществами рекомендуется надевать соответствующие средства защиты: лабораторный халат, перчатки и защитные очки.

- Соблюдайте принятые в лаборатории стандартные меры предосторожности и выполняйте рекомендации по охране здоровья и технике безопасности федерального или регионального уровня.
- Прежде чем приступать к работе с анализатором, оператор обязан пройти обучение у представителя компании HORIBA Medical.
- При возникновении недомогания после попадания на кожу, проглатывания или вдыхания каких-либо веществ обратитесь к врачу.
- См. паспорт безопасности продукта (SDS), относящийся к **ABX Minocclair 0.5L**.
- Любые серьезные происшествия, имевшие место в связи с эксплуатацией анализатора, необходимо доводить до сведения производителя и до уполномоченного органа власти страны, в которой находится оператор прибора и/или пациент.
- Емкости с реагентами являются одноразовыми и подлежат утилизации согласно местным нормативным требованиям.
- За технической помощью обращайтесь по телефону +33 (0)4 67 14 15 16.
- Данный реагент предназначен для использования с указанными выше гематологическими анализаторами HORIBA Medical. Компания HORIBA Medical не может гарантировать правильное действие этого реагента при использовании аппаратов, отличных от указанных выше, или аппаратов, не изготовленных компанией HORIBA Medical.

Утилизация отходов

См. требования региональных нормативных документов.

^aИзменения: новая форма буклета о реагенте.

^bИзменения: аппарат снят с продажи.

^cИзменения: изменение назначения.

^dИзменения: добавлена рекомендация.

ABX Minocclair 0.5L

Микробиологическое состояние

Неприменимо.

Описание и состав

Описание:

Щелочной прозрачный желтоватый водный раствор. Имеет запах извести.

Состав:

Вещество для химической очистки	< 5%
Стабилизатор	< 1%

Условия хранения и стабильность

- **Условия хранения (до вскрытия):** 18-25°C (65-77°F). Не замораживать.
- **Стабильность во вскрытом состоянии:** 6 месяцев максимум при 18-25°C (65-77°F) после вскрытия, в пределах срока годности.
- **Срок годности:** см. срок годности на этикетке упаковки реагента.

Требуемые, но не предоставляемые материалы ^e

- Автоматизированный гематологический анализатор.
- Стандартное лабораторное оборудование.

Проба ^e

Неприменимо.

Процедура

Реагент готов к использованию.

ABX Minocclair 0.5L используется во время процедуры очистки с автоматической концентрацией. См. руководство пользователя прибора для получения информации о запуске очистки с автоматической концентрацией.

Методика

ABX Minocclair 0.5L обладает окислительным действием для очистки гидравлических частей прибора.

Эксплуатационные характеристики и ограничения ^e

Неприменимо.

Вычисление и интерпретация результатов анализа ^e

Неприменимо.

Изменения в порядке работы с продуктом и в его рабочих характеристиках

Повреждение упаковки

В случае повреждения защитной упаковки не используйте раствор **ABX Minocclair 0.5L**, так как повреждения могли повлиять на рабочие характеристики продукта.

Наличие признаков порчи продукта

При наличии каких-либо признаков физической или химической порчи раствора **ABX Minocclair 0.5L** (помутнение, изменение цвета и т.п.) его следует заменить.

Температурные ограничения

Не используйте раствор **ABX Minocclair 0.5L**, если он ранее замораживался или подвергался избыточному нагреву.

Перед использованием **ABX Minocclair 0.5L** убедитесь, что он достиг рабочей температуры, как описано в руководстве пользователя прибора.

Внутренний контроль качества ^e

Неприменимо.

Прослеживаемость калибраторов и контрольных материалов

Неприменимо.

^eИзменения: корректировка.

ABX Minocclair 0.5L

Референсные интервалы

Неприменимо.

