

Hæmatologiudstyr (til in vitro-diagnosticering)

ABX Basolyse

15/01/05
A95A00193B

Eksklusiv anvendelse:

Argos/Helios (5diff)
Micros
Micros CRP
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120
Pentra 120 Retic
Pentra DX 120
Slide Preparation System

REF 0204050 (5L)

REAGENT 5L

IVD 



HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funktioner

Opløsning til differentiering af underpopulationer af leukocytter på HORIBA ABX- instrumenter til celletælling ^a.

Følgende måleprocedure skal følges ved brug af produktet:

Metodens princip, specifikke analytiske karakteristika for ydeevnen, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, nøjagtighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, detektionsgrænser, metodens begrænsninger samt oplysninger om brugerens anvendelse af tilgængelige måleprocedurer og materialer som reference: se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

2. Opbevaring og holdbarhed

Opbevaringsvilkår: Ved stuetemperatur mellem 18°C - 25 °C (65°F - 77°F).

Udløbsdato: Se symbolet for "udløbsdato" på reagensballagens etiket.

3. Målinger, principper og resultater

Anvendelse: se afsnittet: "Vedligeholdelse og fejlfinding/Reagensplacering og tilslutning" i brugermanualen til instrumentet.

Dette reagens er kun beregnet til professionel *in-vitro*-diagnosticering.

Måleprincipper : se afsnittet: "Beskrivelse og teknologi" i brugermanualen til instrumentet.

Resultater: Se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet

Data for ydeevnen: se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

Bemærk! Hvis ydeevnen ændres, skal den lokale forhandler for HORIBA ABX underrettes herom.

4. Sammensætning og forholdsregler ved håndtering

Sammensætning:

Saltsyre.....<0,001 %
Phthalatsyre.....0,09 %
Natriumdodecylsulfat.....0,02 %

pH : 2,7 +/- 0,2 (T = 20°C)

Modstandsevne : 720 +/- 20 Ω (T = 20°C)

Beskrivelse: Gennemsigtig væske i 5L cubitainer i gennemsigtigt plastik.

Forholdsregler ved håndtering: Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Brug laboratoriehandsker ved håndtering af produktet. Produktet kan være skadeligt ved indtagelse eller indånding. Hold flasken lukket, når produktet ikke anvendes. Undgå kontakt med produkter, der indeholder cyanid. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.

Prøvetagning og blanding: se afsnittet: "Arbejdsgang" i brugermanualen til instrumentet.

5. Begrænsninger og bortskaffelse af affald

Begrænsninger: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet.

Sikker bortskaffelse af affald: Se afsnittet: "Specifikationer" i brugermanualen til instrumentet. Se det MSDS (datasikkerhedsblad), der hører til reagenset.