

Hematologiutstyr (til in vitro-diagnostisering)

ABX Basolyse II

Kun til bruk med:

ABX Micros CRP
ABX Micros
ABX Pentra 60
ABX Pentra 60 C+
Pentra ES60
ABX Pentra 80
ABX Pentra XL 80
ABX Pentra 120
ABX Pentra 120 Retic
ABX Pentra DX 120
ABX Slide Preparation System

21/09/09
A95A00002FNO

REF 0906003 (1L)

REAGENT 1L

IVD 



HORIBA ABX SAS
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funksjoner

Erytrocyttlysereagens for telling og basofil differensiering av hvite blodceller på HORIBA Medical-blodcelletellere^a.

Måleprosedyre som skal følges ved bruk av enheten:

Metodeprinsipp, bestemte karakteristika for analytisk ytelse, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk spesifisitet, diagnostisk spesifisitet, nøyaktighet, repeterbarhet, reproducerbarhet (inkludert kontroll av relevante forstyrrelser), begrensninger for sporingsmuligheter, begrensninger for metode og informasjon om bruk av tilgjengelige referansemåleprosedyrer og materialer av brukeren. Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok.

2. Oppbevaring og utløpsdato

Lagringsbetingelser: romtemperatur på mellom 18°C (65°F) og 25°C (77°F).

Stabilitet ved åpning: maksimalt 10 måneder etter at reagenskoppen har blitt åpnet

Utløpsdato: Se "utløpsdato" på reagensens merkelapp.

3. Målinger, prinsipper og resultater

Bruksanvisninger: Se avsnittet: "Vedlikehold og problemløsning" i instrumentets brukerhåndbok.

Måleprinsipper: Se avsnittet "Beskrivelse og teknologi" i instrumentets brukerhåndbok.

Resultater: Se avsnittet: "Arbeidsflyt" i instrumentets brukerhåndbok.

Ytelsesdata: Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok.

Merk: Dersom ytelsene endrer seg, vennligst ring din HORIBA Medical-representant.

4. Sammensetning og forholdsregler ved håndtering

Sammensetning:

Saltsyre..... <5 %
DMTU..... <3 %
Kvaternære ammoniumsalter..... <20%
Konserveringsmiddel..... <20%

pH: 2,4 +/- 0,2 (T = 20°C)

Resistivitet: 61 +/- 2 Ω (T = 20°C)

Beskrivelse: fargeløs vannholdig løsning.

Forholdsregler for håndtering: Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Bruk labhansker når du håndterer produktet. Produktet kan være skadelig hvis det svelges eller inhaleres. Flasken skal være lukket når den ikke er i bruk. Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.

Innhenting og blanding av prøver: Se avsnittet "Arbeidsflyt" i instrumentets brukerhåndbok.

^a.Endring fra indeks E til F: firmanavn, Pentra ES60 tilføyd

5. Begrensninger og avfallshåndtering

Begrensninger: Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok.

Trygg avfallshåndtering: Se avsnittet "Spesifikasjoner" i instrumentets brukerhåndbok. Vennligst les produktdatabladet som gjelder for reagenset.