

Equipamentos de Hematologia ABX (para utilização em diagnóstico in vitro)

ABX Lysebio

Uso exclusivo:

Equipamentos de hematologia ABX	Exclusivo
Micros 60	✓
ABC Vet	
Micros CRP	
Pentra 60	✓
Pentra 60 C+	✓
Pentra 80	✓
Pentra XL 80	✓
Pentra 120	✓
Pentra 120 Retic	✓
Pentra DX 120	✓
Sistema de preparação de lâminas	

23/04/03
A95A00077-A

REF 0906013 (0,4L)
0906012 (1L)

REAGENT 0,4L ou 1L

IVD 



ABX Diagnostics
BP 7290 - 34187 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funções

Este reagente é utilizado nos contadores de glóbulos sanguíneos ABX para efectuar a lise dos glóbulos vermelhos e determinar a concentração de hemoglobina.

Características de análise do equipamento:

Princípio do método, características específicas de performance analítica, sensibilidade analítica, sensibilidade do diagnóstico, especificidade analítica, especificidade do diagnóstico, precisão, repetibilidade, reprodutibilidade (incluindo controlo de interferência relevante conhecida), limites de detecção, limitações do método e informação acerca da utilização de procedimentos de medição de referência disponíveis e de materiais por parte do utilizador: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento.

2. Conservação e Validade

Condições de armazenamento: Armazenar entre 15°C (59°F) e 30°C (86°F) ao abrigo da luz.

Data de validade: consulte o rótulo da embalagem do reagente «data de validade»

3. Medições, princípios e resultados

Instruções de utilização: consulte «Secção: Manutenção e Resolução de Problemas/Posição do Reagente e ligação» no Manual do Utilizador do instrumento.

Princípios de medição : consulte «Secção: Descrição e tecnologia» no Manual do Utilizador do instrumento.

Resultados: consulte «Secção: Fluxo de trabalho» no Manual do Utilizador do instrumento

Dados de performance: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento.

Nota: Se a performance sofrer alterações, contacte o seu representante da ABX Diagnostics.

4. Composição e precauções de manuseamento

Composição:

Sal de amónio quaternário < 5%

Surfactante de base não iónica < 3%

pH : 6,95 +/- 0,1 (T = 25°C)

Resistência específica: 40 +/- 1 Ω

Descrição: Incolor, inodoro.

Precauções de manuseamento: Evitar o contacto com os olhos, pele e roupa. Use luvas de laboratório quando manusear o produto. O produto pode ser nocivo se for ingerido ou inalado. Mantenha o frasco fechado quando não estiver a ser utilizado. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente

Colheita e mistura de amostras: consulte «Secção: Fluxo de trabalho» no Manual do Utilizador do instrumento

5. Limitações e eliminação de resíduos

Limitações: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento.

Eliminação segura de resíduos: consulte «Secção: Especificações» no Manual do Utilizador do instrumento. Consulte a MSDS (folha de dados de segurança do material) relacionada com o reagente.

