

Instrument för hematologi (endast för in vitro-diagnostik)

ABX Lysebio

27/12/05
A95A00011DSV

Exklusiv användning:

Micros*
Micros CRP
Pentra 60
Pentra 60 C+
Pentra 80
Pentra XL 80
Pentra 120*
Pentra 120 Retic*
Pentra DF 120*
Pentra DX 120*
Slide Preparation System

REF 0906012 (1L)*
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L*
0,4L

IVD 


HORIBA ABX
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funktioner

Det här reagenset används med HORIBA ABX-blodkroppsräknare för att lysera röda blodkroppar och för att bestämma hemoglobinkoncentration.

Följande mätmetod ska tillämpas vid användning av enheten:

Metodens princip, särskilda egenskaper för analysens prestanda, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, noggrannhet, repeterbarhet, reproducerbarhet (inklusive kontroll av kända relevanta interferenser), begränsningar för detektion, metodens begränsningar och information om användning av tillgängliga referensprocedurer- och material för mätning: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen.

2. Förvaring & hållbarhet

Förvaringsförhållanden: Förvaras vid 15-30 °C (59-86 °F) skyddat från ljus.

Utgångsdatum: se etikett på förpackningen

3. Mätningar, principer & resultat

Metodbeskrivning: se «avsnittet: Underhåll & felsökning/Placering och anslutningar för reagens» i användarmanualen.

Mätprinciper : se «avsnittet: Beskrivning & teknik» i användarmanualen.

Resultat: se «avsnittet: Arbetsflöde» i användarmanualen.

Prestanda: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen.

Obs! kontakta HORIBA ABX om prestandan förändras.

4. Sammansättning & hanteringsföreskrifter

Sammansättning^a:

Kvartärt ammoniumsalt < 20 %

pH : 6,95 +/- 0,1 (T = 20 °C)

Resistivitet : 40 +/- 1 Ω (T = 20 °C)

Beskrivning: Färg- och doftlöst.

Hanteringsföreskrifter: Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Använd laboratoriehandskar när du hanterar produkten. Produkten kan vara farlig om den förtärs eller inandas. Flaskan ska vara stängd när den inte används. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

Provtagning och -blandning: se «avsnittet: Arbetsflöde» i användarmanualen.

5. Begränsningar & avfallshantering

Begränsningar: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen.

Korrekt avfallshantering: se «avsnittet: Specifikationer» i användarmanualen. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

a.Ändring från A95A0001CSV till A95A0001CSV: Sammansättning

Senaste versionsdokumenten finns
på www.horiba-abx.com

