

Instrument för hematologi (endast för in vitro-diagnostik)

ABX Lysebio

29/09/09
A95A00011FSV

Exklusiv användning:

ABX Pentra 60 (0,4L)
ABX Pentra 60 C+ (0,4L)
Pentra ES60 (0,4L)
ABX Pentra 80 (0,4L)
ABX Pentra XL 80 (0,4L)
ABX Pentra 120 (1L)
ABX Pentra 120 Retic (1L)
ABX Pentra DF 120 (1L)
ABX Pentra DX 120 (1L)
Slide Preparation System

REF 0906012 (1 L)
0906013 (0,4L)

REAGENT 1L
0,4L

IVD 



HORIBA ABX SAS
BP 7290 - 34184 Montpellier
cedex 4 - France

1. Funktioner

Det här reagenset används med HORIBA Medical-blodkroppsräknare för att lysera röda blodkroppar och för att bestämma hemoglobinkoncentration^a.

Följande mätmetod ska tillämpas vid användning av enheten:

Metodens princip, särskilda egenskaper för analysens prestanda, analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk specificitet, diagnostisk specificitet, noggrannhet, repeterbarhet, reproducerbarhet (inklusive kontroll av kända relevanta interferenser), begränsningar för detektion, metodens begränsningar och information om användning av tillgängliga referensprocedurer- och material för mätning: se avsnittet "Specifikationer" i användarmanualen för instrumentet.

2. Förvaring & hållbarhet

Förvaringsförhållanden: Förvaras vid 15-30°C (59-86°F) skyddat från ljus.

Stabilitet efter öppnande: Högst 3 månader efter att en flaska har öppnats.

Utgångsdatum: Se etikett på förpackningen.

3. Mätningar, principer & resultat

Metodbeskrivning: Se avsnittet "Underhåll & felsökning" i användarmanualen.

Mätprinciper: Se avsnittet "Teknik" i användarmanualen.

Resultat: Se avsnittet "Arbetsflöde" i användarmanualen.

Prestanda: Se avsnittet "Specifikationer" i användarmanualen.

Obs! Kontakta HORIBA Medical om prestanda förändras.

4. Sammansättning & hanteringsföreskrifter

Sammansättning:

Kvartärt ammoniumsalt..... < 20 %

pH: 6,95 +/- 0,1 (T = 20°C)

Resistivitet: 40 +/- 1 Ω (T = 20°C)

Beskrivning: Färglös, luktlös.

Hanteringsföreskrifter: Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Använd laboratoriehandskar när du hanterar produkten. Produkten kan vara farlig om den förtärs eller inandas. Flaskan ska vara stängd när den inte används. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

Provtagning och -blandning: Se avsnittet "Arbetsflöde" i användarmanualen för instrumentet.

5. Begränsningar & avfallshantering

Begränsningar: Se avsnittet "Specifikationer" i användarmanualen.

Korrekt avfallshantering: Se avsnittet "Specifikationer" i användarmanualen. Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till reagenset.

^a.Modifiering från index E till F: Pentra ES 60 har lagts till