

ABX Pentra CO₂ Cal

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

REF A11A01648

CAL 3 x 3 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

Kalibrator for måling av totalt CO₂ ved hjelp av kolorimetri.

Tilsiktet bruk

ABX Pentra CO₂ Cal brukes til å kalibrere ABX Pentra CO₂ RTU, ref. A11A01645.

Egenskaper

- ABX Pentra CO₂ Cal er en flytende kalibrator som inneholder 30 mmol/L bikarbonat.
- ABX Pentra CO₂ Cal er klart til bruk. Kittet består av 3 flasker på 3 mL.
- ABX Pentra CO₂ Cal må brukes i henhold til dette kalibratorpakkingsvedlegget og som angitt i bruksanvisningen for det aktuelle reagenset. Produsenten kan ikke garantere for produktets ytelse hvis det brukes på annen måte.

Håndtering

1. Fjern hetten på flasken og bruk en pipette til å overføre volumet til en prøvekopp.
2. Plasser prøvekoppen på instrumentet:
 - For **Pentra C200**: Plasser prøvekoppen i korrekt posisjon i instrumentets prøveområde.
 - For **Pentra C400**: Plasser prøvekoppen i korrekt rack på instrumentet.
 - For **ABX Pentra 400**: Plasser prøvekoppen i korrekt rack på instrumentet.

Nødvendige men ikke medfølgende materialer

- HORIBA Medical reagenser og klinisk kjemianalyseapparat.
- Standard laboratorieutstyr.

Tildelte verdier

De tildelte verdiene kan spores ved hjelp av et referansemateriale (NIST 351, SRM) i samsvar med en etablert protokoll (som kan spores ved hjelp av gravimetrisk prosedyrer). Vennligst se reagenskoppens merkelapp for nøyaktig konsentrasjon.

Oppbevaring og stabilitet ^a

Kalibratorer i uåpnede flasker er stabile frem til utløpsdatoen på merkelappen dersom de har blitt oppbevart ved 2-8°C.

Etter åpning er ABX Pentra CO₂ Cal stabil i 3 måneder ved 2-8°C.

Stabilitet oppnås når reagensflaskene forsegles godt umiddelbart etter bruk og hvis kontaminering er unngått. Må ikke fryses.

Avfallshåndtering

Vennligst overhold lokale lover og regler.

^aModifisering: endring av oppbevaring og stabilitet.

ABX Pentra CO₂ Cal

Generelle forholdsregler ^b

- **ABX Pentra CO₂ Cal** må kun benyttes til bestemmelse av kalibreringskurven.
- Denne reagensen er klassifisert som ufarlig i samsvar med forskrift (EF) nr. 1272/2008.
- Denne kalibratoren må kun brukes til profesjonell *in vitro*-diagnostikk.
- Må kun brukes som foreskrevet.
- Laboratoriets standardforholdsregler for bruk må overholdes.
- Reagensflaskene med kalibrator må kastes etter bruk. Alt avfall må kastes i samsvar med lokale retningslinjer.
- Vennligst les produktdatabladet som gjelder for kalibratoren.
- Ikke bruk produktet i tilfeller hvor det finnes synlig bevis på biologisk, kjemisk eller fysisk nedbryting.
- Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at dette dokumentet gjelder for den kalibratoren som benyttes.

^bModifisering: endring av generelle forholdsregler.