

ABX Pentra CO₂ Cal

- Pentra C200
- Pentra C400
- ABX Pentra 400

REF A11A01648

CAL 3 x 3 mL

IVD CE



HORIBA ABX SAS
Parc Euromédecine - Rue du Caducée
B.P. 7290
34184 MONTPELLIER Cedex 4
FRANCE

Kalibrator för mätning av totalt koldioxid med hjälp av kolorimetri.

Användningsområde

ABX Pentra CO₂ Cal används för att kalibrera ABX Pentra CO₂ RTU, ref. A11A01645.

Egenskaper

- ABX Pentra CO₂ Cal är en kalibrator i vätskeform som innehåller 30 mmol/L bikarbonat.
- ABX Pentra CO₂ Cal är klart att användas. Satsen består av 3 förpackningar med 3 mL.
- ABX Pentra CO₂ Cal ska användas i enlighet med denna kalibratorbipacksedel och specifikationerna i bruksanvisningen till respektive reagens. Om anvisningarna inte följs kan tillverkaren inte garantera prestandan.

Hantering

1. Ta av flaskans lock och använd en pipett för att överföra erforderlig volym till en provkopp.
2. Placera provkoppen i instrumentet:
 - För Pentra C200: Placera provkoppen i korrekt position på instrumentets provbricka.
 - För Pentra C400: Placera provkoppen i lämpligt instrumentrack.
 - För ABX Pentra 400: Placera provkoppen i lämpligt instrumentrack.

Material som behövs men ej medföljer

- HORIBA Medical reagenser och automatiskt kliniskt-kemiskt analysinstrument.
- Vanlig laboratorieutrustning.

^aModifiering: modifiering av förvaring och stabilitet.

^bModifiering: modifieringar av allmänna försiktighetsåtgärder.

Tilldelade värden

De tilldelade värdena är spårbara med ett referensmaterial (NIST 351, SRM) i enlighet med ett fastställt protokoll (spårbart till gravimetriskt förfarande). Exakt koncentration anges på flaskans etikett.

Förvaring och stabilitet ^a

Kalibratorer i öppnade förpackningar är stabila fram till det utgångsdatum som anges på etiketten om de förvaras vid 2-8°C.

Sedan förpackningen öppnats är ABX Pentra CO₂ Cal stabil i 3 månader vid 2-8°C.

Denna stabilitet erhålls under förutsättning att flaskorna försluts omedelbart efter användning och skyddas mot kontaminering. Får inte frysas.

Avfallshantering

Följ gällande föreskrifter.

Allmänna försiktighetsåtgärder ^b

- ABX Pentra CO₂ Cal ska endast användas för att fastställa kalibreringskurvan.
- Denna reagens är klassificerad som icke-hälsosam i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.
- Denna kalibrator är endast avsedd för yrkesmässig *in vitro*-diagnostik.
- Endast avsedd för bruksanvisningar.
- Följ sedvanliga försiktighetsåtgärder för laboratoriearbete.

ABX Pentra CO₂ Cal

- Kalibratorflaskorna ska kasseras efter användning. Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Ytterligare information finns i det varuinformationsblad som hör till kalibratoren.
- Använd inte produkten om det finns synliga tecken på biologisk, kemisk eller fysisk skada.
- Användaren är skyldig att kontrollera att detta dokument är tillämpligt för den kalibrator som används.